SEGUNDA EDICIÓN-2021

GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS DE HERIDAS Y ÚLCERAS





Avda. Salvador 737, Providencia - Santiago.

Fonos: 222237667 | 222748352

www.inheridas.cl | facebook.com/inheridas

MATERIAL RECOMENDADO PARA CONSULTAR



Canal de YouTube FINH 2021



Orientación Técnica Manejo Integral del Pie Diabético 2018



Revista Chilena de Heridas y Ostomías



Introd	ucción	6	8	MEPILEX LITE /MEPILEX	34
VACA	В	7	0	BORDER LITE	25
Protoc	colo No Infectado	8	9	EXUFIBER AG	35
Algori	tmo No Infectado	9		EXUFIBER	36
Protoc	colo Infectado	10	11	NORMLGEL AG	37
Algori	tmo Infectado	11	12		38
1	LBF	1	13	MEPIFORM	39
1	Portada	12	14	MEPITAC	40
2	Contacto	13		¿QUE ES SAFETAC?	41
3	ACTICOAT™ FLEX 3	14	3	CONVATEC	42
4	ALLEVYN™	15	1	Portada	42
5	ALLEVYN™ LIFE / LIFE	16	2	Contacto	43
	SACRUM		3	AQUACEL Ag	44
6	ALLEVYN™ Ag GENTLE	17	4	AQUACEL EXTRA	45
7	BORDER	40	5	AQUACEL FOAM	46
7	INTRASITE™ GEL	18	6	ESENTA	47
8	NOVAMED MILK	19	7	DUODERM	48
9	NOVAMED OIL	20	8	FLEXI-DRESS	49
10	ULMOPLUS	21	9	SUREPRESS	50
11	JELONET™	22	10	AVELLE	51
12	BACTIGRAS™	23	4	URGO	52
13	REMOVE™	24	1	Portada	52
14	OPSITE™ FLEXIGRID™	25	2	CONTACTO	53
15	RENASYS⇔	26	3	VASHE	54
2	MOLNLYCKE	27	4	URGO START	55
1	Portada	27	5	URGO CLEAN Ag	56
2	Contacto	28	6	URGO CLEAN	57
3	GRANULOX	29	7	URGO TUL Ag/Silver	58
4	GRANUDACYN	30	8	URGO K2	59
5	MEPILEX AG	31	9	CORPITOL	60
6	MEPILEX	32	10	URGO Tul	61
7	MEPILEX BORDER /SACRUM/	33	10	ONGO IUI	01

ÍNDICE



	5	BLUNDING	62	3	LINOVERA®	86
	1	Portada	62	4	LINOVERA® EMULSION	87
	2	Contacto	63	5	LINOVERA® SCAR REPAIR	88
	3	MESI ABPI MD	64	6	PRONTOSAN® SOLUCIÓN	89
	4	KIT ZAPATO DE DESCARGA ANTEPIÉ ABIERTO	65	7	PRONTOSAN® GEL	90 91
	5	BOTA DE DESCARGA CORTA O LARGA	66	8	ASKINA CALGITROL AG LÁMINA®	
	6	ZAPATO DE DESCARGA	67	9	ASKINA CALGITROL THIN®	92
	U	CUIDADO DE HERIDAS	0,	10	ASKINA CALGITROL AG PASTA®	93
	7	ZAPATOS PARA DIABÉTICO	68	11	ASKINA DRESSIL®	94
	8	MAXIS MICRO	69	12	ASKINA SILNET®	95
	9	CALCETA COMPRESIVA ULCER KIT	70	13	ASKINA SCAR REPAIR®	96
1	0	CIRCAID JUXTA-LITE	71	14	BBRAUN REMOVEDOR ADHESIVO®	97
	6	AVALON	72	15	CONCEPTO DE HIGIENE DE	98
	1	Portada	72	13	MANOS	30
	2	Contacto	73	9	COMERCCIA	99
	2	Contacto REOXCARE	73 74	9	COMERCCIA Portada	99 99
	_					
	3	REOXCARE	74	1	Portada Contacto FIELTRO DE DESCARGA	99
	3	REOXCARE MEDELA	74 75	1 2 3	Portada Contacto FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICA	99 100
	3 4 5	REOXCARE MEDELA NEXOBRID	74 75 76	1 2 3	Portada Contacto FIELTRO DE DESCARGA	99 100
	3 4 5 6	REOXCARE MEDELA NEXOBRID SUPRA THEL	74 75 76 77	1 2 3	Portada Contacto FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICA	99 100 101
	3 4 5 6	REOXCARE MEDELA NEXOBRID SUPRA THEL HARTMANN	74 75 76 77 78	1 2 3	Portada Contacto FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICA MEDIVEN PLUS ÚLCER KIT MAXIS RELAX, MAXI MICRO CALZADOR PARA CALCETAS	99 100 101 102
	3 4 5 6 7	REOXCARE MEDELA NEXOBRID SUPRA THEL HARTMANN Portada	74 75 76 77 78	1 2 3 4 5 6	Portada Contacto FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICA MEDIVEN PLUS ÚLCER KIT MAXIS RELAX, MAXI MICRO CALZADOR PARA CALCETAS COMPRESIVAS	99 100 101 102 103 104
	3 4 5 6 7 1 2	REOXCARE MEDELA NEXOBRID SUPRA THEL HARTMANN Portada Contacto	74 75 76 77 78 78 79	1 2 3 4 5 6	Portada Contacto FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICA MEDIVEN PLUS ÚLCER KIT MAXIS RELAX, MAXI MICRO CALZADOR PARA CALCETAS COMPRESIVAS PROMEDON	99 100 101 102 103 104
	3 4 5 6 7 1 2	REOXCARE MEDELA NEXOBRID SUPRA THEL HARTMANN Portada Contacto HYDROCLEAN PLUS	74 75 76 77 78 78 79 80	1 2 3 4 5 6	Portada Contacto FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICA MEDIVEN PLUS ÚLCER KIT MAXIS RELAX, MAXI MICRO CALZADOR PARA CALCETAS COMPRESIVAS PROMEDON Portada	99 100 101 102 103 104 105
	3 4 5 6 7 1 2 3 4	REOXCARE MEDELA NEXOBRID SUPRA THEL HARTMANN Portada Contacto HYDROCLEAN PLUS HYDROTAC	74 75 76 77 78 78 79 80 81	1 2 3 4 5 6	Portada Contacto FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICA MEDIVEN PLUS ÚLCER KIT MAXIS RELAX, MAXI MICRO CALZADOR PARA CALCETAS COMPRESIVAS PROMEDON Portada Contacto	99 100 101 102 103 104 105 105
	3 4 5 6 7 1 2 3 4 5	REOXCARE MEDELA NEXOBRID SUPRA THEL HARTMANN Portada Contacto HYDROCLEAN PLUS HYDROTAC MOLICARE SKIN	74 75 76 77 78 78 79 80 81 82	1 2 3 4 5 6 10 1 2 3	Portada Contacto FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICA MEDIVEN PLUS ÚLCER KIT MAXIS RELAX, MAXI MICRO CALZADOR PARA CALCETAS COMPRESIVAS PROMEDON Portada Contacto COLACTIVE PLUS	99 100 101 102 103 104 105 105 106 107
	3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6	REOXCARE MEDELA NEXOBRID SUPRA THEL HARTMANN Portada Contacto HYDROCLEAN PLUS HYDROTAC MOLICARE SKIN PEHA INSTRUMENT	74 75 76 77 78 78 79 80 81 82 83	1 2 3 4 5 6 10 1 2 3 4	Portada Contacto FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICA MEDIVEN PLUS ÚLCER KIT MAXIS RELAX, MAXI MICRO CALZADOR PARA CALCETAS COMPRESIVAS PROMEDON Portada Contacto COLACTIVE PLUS COVAWOUND	99 100 101 102 103 104 105 105 106 107 108
	3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6	REOXCARE MEDELA NEXOBRID SUPRA THEL HARTMANN Portada Contacto HYDROCLEAN PLUS HYDROTAC MOLICARE SKIN PEHA INSTRUMENT BBRAUN	74 75 76 77 78 78 79 80 81 82 83	1 2 3 4 5 6 10 1 2 3	Portada Contacto FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICA MEDIVEN PLUS ÚLCER KIT MAXIS RELAX, MAXI MICRO CALZADOR PARA CALCETAS COMPRESIVAS PROMEDON Portada Contacto COLACTIVE PLUS	99 100 101 102 103 104 105 105 106 107



11	VARIMED	111	3	CUTIMED® SILTEC® SORBACT	133
1	Portada	111	4		134
2	KIT DE HERIDAS CON CIERRE	112		HYDROACTIVE	
	DOBLE CAPA		5	CUTIMED® PROTECT	135
3	KIT DE HERIDAS SIN CIERRE Doble capa	113	6	CUTIMED® ACUTE	136
4	CALCETÍN UNA CAPA DE	114	7	CUTIMED® SILTEC	137
4	COMPRESIÓN GRADUADA	114	8	CUTICELL® CONTACT	138
5	CALCETÍN PRIMERA CAPA	115	9	JOBST® ULTRASHEER	139
	COMPRESIÓN GRADUADA		10	JOBST® FORMEN	140
12	RENHET	116	11	JOBST® ULCERCARE	141
1	Portada	116		JOBST® COMPRI2	142
2	Contacto	117	15	3M	143
3	CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA	118	1	Portada	143
4	CINTA ADHESIVA	119	2	Contacto	144
4	HOSPITALARIA	119	3	3M™ CAVILON™ PELÍCULA PROTECTORA	145
	CINITA A DI IECIVA	120			
5	CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA	120	4	3M™ CAVILON™ CREMA DE BARRERA	146
5 13		120 121	5		146 147
	HOSPITALARIA			BARRERA	
13	HOSPITALARIA CARDINAL HEALTH	121		BARRERA 3M™ TEGADERM™ SILICONE	
13	HOSPITALARIA CARDINAL HEALTH Portada	121 121	5	BARRERA 3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM 3M™ TEGADERM™ FOAM 3M™ PROMOGRAN PRISMA™	147
13 1 2	HOSPITALARIA CARDINAL HEALTH Portada Contacto	121 121 122	5 6 7	BARRERA 3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM 3M™ TEGADERM™ FOAM 3M™ PROMOGRAN PRISMA™ MATRIX	147 148 149
13 1 2 3	HOSPITALARIA CARDINAL HEALTH Portada Contacto KENDALL™ AMD ESPUMA KENDALL™ REINFORCED GELLING FIBER	121 121 122 123	5 6 7 8	BARRERA 3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM 3M™ TEGADERM™ FOAM 3M™ PROMOGRAN PRISMA™ MATRIX 3M™ FIBRACOL™ PLUS	147 148 149
13 1 2 3 4 5	HOSPITALARIA CARDINAL HEALTH Portada Contacto KENDALLTM AMD ESPUMA KENDALLTM REINFORCED GELLING FIBER + Ag	121 121 122 123 124 125	5 6 7 8 9	BARRERA 3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM 3M™ TEGADERM™ FOAM 3M™ PROMOGRAN PRISMA™ MATRIX 3M™ FIBRACOL™ PLUS 3M™ ADAPTIC TOUCH™	147 148 149 150 151
13 1 2 3 4 5	HOSPITALARIA CARDINAL HEALTH Portada Contacto KENDALL™ AMD ESPUMA KENDALL™ REINFORCED GELLING FIBER + Ag EXCILON™ AMD	121 121 122 123 124 125	5 6 7 8	BARRERA 3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM 3M™ TEGADERM™ FOAM 3M™ PROMOGRAN PRISMA™ MATRIX 3M™ FIBRACOL™ PLUS	147 148 149
13 1 2 3 4 5 6 7	HOSPITALARIA CARDINAL HEALTH Portada Contacto KENDALL™ AMD ESPUMA KENDALL™ REINFORCED GELLING FIBER + Ag EXCILON™ AMD KERLIX AMD	121 121 122 123 124 125 126 127	5 6 7 8 9	BARRERA 3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM 3M™ TEGADERM™ FOAM 3M™ PROMOGRAN PRISMA™ MATRIX 3M™ FIBRACOL™ PLUS 3M™ ADAPTIC TOUCH™ 3M™ SILVERCEL™ NO ADHERENTE	147 148 149 150 151 152
13 1 2 3 4 5 6 7 8	HOSPITALARIA CARDINAL HEALTH Portada Contacto KENDALL™ AMD ESPUMA KENDALL™ REINFORCED GELLING FIBER + Ag EXCILON™ AMD KERLIX AMD XEROFORM	121 121 122 123 124 125 126 127 128	5 6 7 8 9 10	BARRERA 3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM 3M™ TEGADERM™ FOAM 3M™ PROMOGRAN PRISMA™ MATRIX 3M™ FIBRACOL™ PLUS 3M™ ADAPTIC TOUCH™ 3M™ SILVERCEL™ NO ADHERENTE 3M™ ACTISORB™ PLUS 25	147 148 149 150 151 152 153
13 1 2 3 4 5 6 7 8 9	HOSPITALARIA CARDINAL HEALTH Portada Contacto KENDALLTM AMD ESPUMA KENDALLTM REINFORCED GELLING FIBER + Ag EXCILONTM AMD KERLIX AMD XEROFORM TELFA AMD	121 121 122 123 124 125 126 127 128 129	5 6 7 8 9	BARRERA 3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM 3M™ TEGADERM™ FOAM 3M™ PROMOGRAN PRISMA™ MATRIX 3M™ FIBRACOL™ PLUS 3M™ ADAPTIC TOUCH™ 3M™ SILVERCEL™ NO ADHERENTE	147 148 149 150 151 152
13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	HOSPITALARIA CARDINAL HEALTH Portada Contacto KENDALL™ AMD ESPUMA KENDALL™ REINFORCED GELLING FIBER + Ag EXCILON™ AMD KERLIX AMD XEROFORM TELFA AMD TELFA CLEAR	121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	5 6 7 8 9 10	BARRERA 3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM 3M™ TEGADERM™ FOAM 3M™ PROMOGRAN PRISMA™ MATRIX 3M™ FIBRACOL™ PLUS 3M™ ADAPTIC TOUCH™ 3M™ SILVERCEL™ NO ADHERENTE 3M™ ACTISORB™ PLUS 25 3M™ TEGADERM™ ALGINATO	147 148 149 150 151 152 153
13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14	HOSPITALARIA CARDINAL HEALTH Portada Contacto KENDALL™ AMD ESPUMA KENDALL™ REINFORCED GELLING FIBER + Ag EXCILON™ AMD KERLIX AMD XEROFORM TELFA AMD TELFA CLEAR ESSITY	121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	5 6 7 8 9 10 11 12	BARRERA 3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM 3M™ TEGADERM™ FOAM 3M™ PROMOGRAN PRISMA™ MATRIX 3M™ FIBRACOL™ PLUS 3M™ ADAPTIC TOUCH™ 3M™ SILVERCEL™ NO ADHERENTE 3M™ ACTISORB™ PLUS 25 3M™ TEGADERM™ ALGINATO AG	147 148 149 150 151 152 153 154
13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14	HOSPITALARIA CARDINAL HEALTH Portada Contacto KENDALL™ AMD ESPUMA KENDALL™ REINFORCED GELLING FIBER + Ag EXCILON™ AMD KERLIX AMD XEROFORM TELFA AMD TELFA CLEAR	121 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	5 6 7 8 9 10 11 12	BARRERA 3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM 3M™ TEGADERM™ FOAM 3M™ PROMOGRAN PRISMA™ MATRIX 3M™ FIBRACOL™ PLUS 3M™ ADAPTIC TOUCH™ 3M™ SILVERCEL™ NO ADHERENTE 3M™ ACTISORB™ PLUS 25 3M™ TEGADERM™ ALGINATO AG 3M™ TEGADERM™ ALGINATO	147 148 149 150 151 152 153 154



16	MADEGOM	158	8	SUPRASORB® C	165
1	Portada	158	9	SUPRASORB® F	166
2	Contacto	159	10	SUPRASORB® G	167
3	SUPRASORB® CNP	160	11	SUPRASORB®P SENSITIVE	168
4	DEBRISOFT® PAD	161	12	$SUPRASORB^{\otimes} X + PHMB$	169
5	LOMATUELL® PRO	162	13	VARICEX® S	170
6	ROSIDAL® TCS	163	14	VLIWAKTIV® AG	171
7	SUPRASORB® A + AG	164	15	VLIWASORB®	172

ÍNDICE INSUMOS CLÍNICOS POR NOMBRES GENÉRICOS

INSUMOS PARA CURACIÓN	PÁGINA
Limpiadores de piel	82
Removedor de adhesivo	24, 97
Limpiadores de heridas	30, 54, 89, 161
Curetas para desbridar	83
Protector cutáneo	47, 135, 145, 146
Hidratantes para piel	19, 20, 60, 86, 87, 136, 146
Apósitos Bactericidas	14, 17, 31, 35, 37, 44, 56, 58, 91, 92, 93, 125, 152, 153, 154, 164, 171
Apósitos Bacteriostáticos	21, 80, 90, 123, 126, 127, 129, 133, 134, 169
Apósitos Absorbentes	15, 16, 32, 33, 34, 36, 45, 46, 57, 81, 94, 124, 137, 147, 148, 155, 168, 172
Apósitos Hidratantes	18, 22, 23, 25, 38, 39, 48, 61, 88, 95, 96, 109, 128, 130, 138, 151, 156, 162, 166, 167
Apósitos Regeneradores	55, 74, 107, 108, 149, 150, 165
Cintas adhesivas	40, 118, 120



ÍNDICE INSUMOS CLÍNICOS POR NOMBRES GENÉRICOS

SISTEMA COMPRESIVO	PÁGINA
Bota de Unna	.49, 170
Venda de Una Capa	50
Venda de Dos Capas	59, 142, 157, 163
Calcetín Compresivo 40mmHg	70, 71, 102, 112, 113, 114, 141
Calcetín Compresivo 20- 30mmHg	69, 71, 103, 139, 140
Calcetín compresivo 15-24 mmHg	115, 139, 140
Calzador de calcetas compresivas	104
DESCARGAS	PÁGINA
Fieltros	101
Bota de descarga	66
Zapato de descarga	65, 67
Zapato terapéutico	68
TERAPIAS COADYUVANTES	PÁGINA
Presión Negativa	26, 51, 75, 110, 160
Terapia de Oxigenación	29
Desbridante Enzimático	76
Revestimiento Dérmico	77
MÁQUINA DIAGNÓSTICA	PÁGINA
DISPOSITIVO DE ITB	64



INTRODUCCIÓN

undación Instituto Nacional de Heridas(FINH) edita esta segunda Guía de Insumos Clínicos de Heridas y Úlceras, por la necesidad de actualizar los nuevos insumos clínicos que han ingresado al país, para que este documento continúe ayudando al profesional clínico dedicado a realizar curación avanzada y también para aquellos profesionales que gestionan las compras de estos insumos.

Al igual que en la primera edición, podrá descargar por medio de código QR Guía Clínica del Ministerio de Salud, Revistas en Manejo de Heridas y Ostomías y podrá acceder directamente al canal de YouTube de la FINH. También encontraran una actualización de los protocolos en curación avanzada para heridas y úlceras con infección, colonización crítica y colonización baja.



VACAB



VALORACIÓN DE CARGA BACTERIANA DE HERIDAS Y ÚLCERAS, FINH (VACAB)

	Epitelización	Colonización Baja	Colonización Crítica	Infección
Calidad Exudado	Sin exudado	Seroso	Turbio	Purulento
Tejido Esfacelado más Necrótico	Piel cicatrizada	0%	≥1% - 100%	≥25% -100%
Piel circundante	Sana, Pigmentada, Descamada	Sana, Pigmentada, Descamada o Macerada	Sana, Pigmentada, Descamada o Macerada	Eritematosa
Calor Local	NO NO	NO	NO	SI

Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2021



PROTOCOLO GENERAL DE HERIDAS Y ÚLCERAS

CURACIÓN AVANZADA NO INFECTADO COLONIZACIÓN CRÍTICA - COLONIZACIÓN BAJA

Actividad	Observación
VACAB	Cada 15 días
Toma de cultivo	No
Arrastre mecánico	Duchoterapia o jeringa con aguja (solo si aplicas jabón o si la herida o úlcera está con colonización baja)
Desbridamiento quirúrgico	Sobre 25% tejido esfacelado y/o necrótico en colonización crítica
Limpieza de la piel	Con Espuma Limpiadora o jabón pH 5 o neutro en cada curación o Clorhexidina Jabonosa al 2 o 4% 1 vez a la semana
Limpieza de la herida o úlcera	Colonización Crítica:Polihexanida con Betaína o Ácido Hipocloroso 50 o 330 ppm o Plata iónica con mentol y glicerol en cada curación o Clorhexidina Jabonosa al 2% solo una vez por semanas. Colonización Baja: Solo solución fisiológica
Protección de la piel	-Piel macerada: protector cutáneo -Piel descamada, pigmentada o sana: ácido graso hiperoxigenado o cremas a base de 10% de ureas
Apósito primario	Según algoritmo
Apósito secundario	Tradicional o tradicional especial
Fijación	Venda semi elástica (en extremidades inferior o superior) cinta de gasa o de rayón en el resto del cuerpo
Frecuencia de curación	Según algoritmo de apósitos

Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2021

ALGORITMO DE APÓSITOS



HERIDAS O ÚLCERAS NO INFECTADAS COLONIZACIÓN CRÍTICA - COLONIZACIÓN BAJA



Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2021

Nota: Algunos Inhibidores de la Metaloproteasa también se pueden aplicar con exudado moderados.



PROTOCOLO GENERAL DE HERIDAS Y ÚLCERAS

CURACIÓN AVANZADA HERIDAS O ÚLCERAS CON INFECCIÓN

Actividad	Observación
VACAB	Cada 7 días.
Toma de cultivo	Aeróbico(con esfacelo) — Anaeróbico y Aeróbico(tejido necrótico).
Arrastre mecánico	Duchoterapia (al tomar el cultivo o si utiliza jabón).
Desbridamiento quirúrgico	Si, siempre.
Limpieza de la piel	Con Espuma Limpiadora o jabón pH 5 o neutro a diaria o Clorhexidina Jabonosa al 2-4% 1 vez a la semana.
Limpieza de la herida o úlcera	Polihexanida con Betaína o Ácido Hipocloroso 50 o 330 ppm o Plata iónica con mentol y glicerol en cada curación o Clohexidina Jabonosa al 2% por 3 dias consecutivos como máximo y luego una vez por semana.
Protección de la piel	Protector cutáneo
Apósito primario	Apósito con plata, bactericida
Apósito secundario	Tradicional o Tradicional Especial.
Fijación	Venda semi elástica (en extremidades inferior o superior). Cinta de gasa o de rayón en el resto del cuerpo.
Frecuencia de curación	Cada 24 a 48 horas según eritema perilesional y condiciones del paciente

Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2021

ALGORITMO DE APÓSITOS



HERIDAS O ÚLCERAS CON INFECCIÓN

Apósito Primario

Con exudado moderado

- Plata nanocristalina
- Alainato de plata
- Carboximetilcelulosa con plata
- Espuma con plata
- Tull con plata metálica
- Carbón activado con plata

Con exudado escaso

- Gasa con Plata
 - Hidroael con plata
- Tull con plata iónica

Apósito ecundario

Tradicional o tradicional especial

Frecuencia de cambio

24 a 48 horas

Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas (FINH), 2021

En el caso de manejo de úlcera de pie diabético infectado o no infectado, es imprescindible la utilización de dispositivo de descarga, tales como zapato, botín o bota de descarga dependiendo del caso.



Contacto Ventas





Nuestro equipo está encantado de poder ayudarle con soluciones costo-efectivas para prevención y tratamiento de heridas.

comercial y técnica

en todo el territorio **Chileno**





www.LBF.cl



contacto@LBF.cl



+56 226742200



BACTERICIDA, PLATA NANOCRISTALINA

ACTICOAT™ FLEX 3

Descripción del Producto: Apósito barrera antimicrobiana de plata nanocristalina*, compuesto de una capa flexible y conformable.

Se puede recortar. Si hay exudado escaso aplicar agua bidestilada o hidrogel. en la lesión. Activar el apósito con agua destilada o hidrogel sobre el apósito. Retirar para hacer estudios de RNM, ECG, ECG2.

Indicaciones: En heridas o úlceras infectadas, quemaduras de profundidad parcial y total, en combinación con la TPN (Terapia de Presión Negativa), heridas de pie diabético, úlceras venosas, úlceras por presión con infección.





Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-04031	1299459	10x10 cm	1/12

^{*} Tecnología patentada por NUCRYST Pharmaceuticals Corp.





ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA

ALLEVYN TM

Descripción del Producto: Apósito espuma hidrocelular trilaminar adhesiva, no adhesiva, para talón y zona sacra. No usar con substancias oxidantes que contengan cloro. No usar sobre substancias oleosas. Se pueden recortar para su uso en liberación de presión. Se puede usar como apósito secundario.

Indicaciones: Prevención de lesiones por presión, úlcera venosa, úlcera de pie diabético, heridas o úlceras con colonización baja y exudado moderado a abundante.

Frecuencia de cambio: Tratamiento 1 a 2 días o cuando 70% del apósito se vuelva color café. Para prevención hasta 7 días.



Allevyn adhesivo



Allevyn no



Allevyn Heel



Allevyn Sacrum

Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-02904	-	Allevyn adhesivo 7,5 x 7,5 cm	1/10
037-02905	1399754	Allevyn adhesivo 12,5 x 12,5 cm	1/10
037-03553	1299462	Allevyn no adhesivo 10 x 10 cm	1/10
037-03551	1299460	Allevyn heel 10,5 x 13,5 cm	1/5
037-03549	1377503	Allevyn sacrum 17 x 17 cm	1/10



ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA

ALLEVYN™ LIFE / LIFE SACRUM

Descripción del Producto: Apósito espuma hidrocelular de 5 capas con adhesivo de silicona que permite levantar para observar la herida o la zona a proteger y volver a adherir sin dañar la piel. No usar con substancias oxidantes que contengan cloro. No usar sobre substancias oleosas. Se pueden recortar para su uso en liberación de presión. Se puede usar como apósito secundario.

Indicaciones: Heridas crónicas y agudas con colonización baja con gran exudado, úlcera de pie diabético, heridas malignas, profilaxis de lesiones por presión.

Frecuencia de cambio: Tratamiento 1 a 2 días o cuando 70% del apósito se vuelva color café. Para prevención hasta 7 días.



Allevyn Life



Allevyn Life Sacrum

Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-04643	1611627	Allevyn Life 10,3 x 10,3 cm	1/10
037-04452	-	Allevyn Life 12,9 x 12,9 cm	1/10
037-04533	1387332	Allevyn Life 15,4 x 15,4 cm	1/10
037-04451	1299461	Allevyn Life Sacrum 17,2 x 17,5 cm	1/10





BACTERICIDA, ESPUMA CON PLATA IÓNICA

ALLEVYN™ AG GENTLE BORDER

Descripción del producto:Espuma hidrocelular bactericida con borde de silicona. Apósito espuma hidrocelular trilaminar que contiene sulfadiazina de plata y un adhesivo de silicona.

Indicaciones: Heridas o úlceras de moderada a abundante exudado, con infección con piel perilesional frágil, en colonización crítica solo en el esfacelo.

Frecuencia de cambio: Desde 24 a 48 hrs



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-04072	1426063	12,5 cm x 12,5 cm	1/10



HIDRATANTE, GEL AMORFO

INTRASITETM GEL

Descripción del Producto:

Hidrogel transparente y amorfo, compuesto de carboximetilcelulosa, propilenglicol y agua. Envase Applipak estéril. No aplicar sobre piel sana. Sólo cubrir 80% de la herida.

Indicaciones: En heridas y úlceras con colonización baja y exudado escaso. Se puede utilizar para el desbridamiento autolítico con exudado escaso.

Frecuencia de cambio: Usar hasta 72 hrs.



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-03557	1333605	15 gr	1/10





HIDRATANTE, ACIDO GRASO HIPEROXIGENADO EN EMULSIÓN

NOVAMED MILK

Descripción del Producto: Es un producto con composición innovadora y única de elevada concentración de ácidos grasos hiperoxigenados: linoleico, oleico, palmítico, además de otros ácidos grasos, silicona, vitamina E. 100% Libre de látex.

Realizar 1 o 2 pulverizaciones de Novamed® Skincare 2 o 3 veces al día, sobre las zonas a tratar, y extender el producto con la yema de los dedos sin masajear para facilitar su aplicación.

Indicaciones: Aplicar en pieles sanas, descamadas, pigmentadas y en cuidado y protección de la piel sensible, piel frágil alrededor de la úlcera, en piel de zonas con riesgo de ulceración.

Frecuencia de cambio: Dos o tres veces al día.



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
085-05041	-	Skincare Milk 100 ml	1/24





HIDRATANTE, ÁCIDO GRASO HIPEROXIGENADO

NOVAMED OIL

Descripción del Producto:

Es una solución tópica compuesta de ácidos grasos hiperoxigenados (95%) y silicona (5%). 100% libre de látex. Realizar 1 o 2 pulverizaciones de Novamed[®] Skincare 2 o 3veces al día, sobre las zonas a tratar, y extender el producto con la yema de los dedos sin masajear para facilitar su aplicación.

Indicaciones: Está indicado para la prevención de Lesiones Por Presión (LPP). Especialmente para zonas delicadas como sacro, talón o codo o en pieles descamadas o pigmentadas.

Frecuencia de cambio: Desde 24 a 72 hrs.



095 05040 Skincaro Oil 20 ml 1/20	Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
000-00040 - Skilicale Oli 20 IIII 1/20	085-05040	-	Skincare Oil 20 ml	1/20





BACTERIOSTÁTICO, MIEL GRADO MÉDICA

ULMOPLUS

Descripción del Producto: Áposito en gel en base a miel de Ulmo + vitamina C, certificado en NHF con altos niveles de compuestos antibacterianos y antioxidantes. Posee un pH bajo y una osmolaridad alta, lo que favorece el desbridamiento osmótico de las heridas con tejido esfacelado o necrótico. Ayuda a controlar olores, es de fácil aplicación y remoción sin causar traumas en la lesión. No

usar en personas con alergia a la miel o al ácido ascórbico. No usar en pacientes menores de 12 meses. No usar en quemadura de 3° grado o en úlceras vasculares de origen arterial.

Indicaciones: En heridas y úlceras con colonización crítica y exudado escaso, moderado a abundante

Frecuencia de cambio: Diario o hasta 72 hrs.

* Elaborado en Chile.



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
552-04990	-	30 gr	1/12





HIDRATANTE, TUL DE PETROLATO

JELONETTM

Descripción del Producto: Apósito de gasa estéril parafinada, suave y de baja adherencia que puede ser utilizada con cualquier medicamento tópico.

No combinar con apósitos de plata.

Indicaciones: Apósito primario en quemaduras de primer grado, heridas o úlceras Tipo I, laceraciones, abrasiones y áreas donantes y receptoras de injertos. Aplicar en epitelización. Útil como apósito secundario.

Frecuencia de cambio:

- El cambio debe realizarse cada 24 a 72 horas.
- Como apósito de interface, debe realizarse de acuerdo al apósito primario.



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-00696	1333379	10 cm x 10 cm	1/100
037-00697	1527970	10 cm x 7 m	1/1



HIDRATANTE, TUL CON PETROLATO

BACTIGRASTM

Descripción del Producto: Apósito de tul de petrolato con antiséptico (Clorhexidina). Si BACTIGRAS™ se adhiere a la herida, retire con solución salina. No debe ser aplicado en más de 10% del área corporal.

Indicaciones: Apósito ideal para el tratamiento profiláctico de heridas con alto riesgo de colonización. Aplicar en epitelización o como apósito secundario.

Frecuencia de cambio: 24 a 72 horas



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-04181	1557262	5 cm x 5 cm	1/50
037-04182	1387333	10 cm x 10 cm	1/10



REMOVEDOR DE ADHESIVO

REMOVETM

Descripción del Producto: Limpia suavemente los residuos de apósitos adhesivos y vendajes sin provocar irritación. Indicado también en pacientes ostomizados y pacientes geriátricos.

No usar en pacientes menores de 12 meses.

Indicaciones: Para la eliminación de adhesivos en base a acrilato.

Frecuencia de Uso: Cada vez que se necesite.



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-03019	1527969	4,5 cm x 4,5 cm	1/50





HIDRATANTE, TRANSPARENTE ADHESIVO

OPSITETM FLEXIGRIDTM

Descripción del Producto: Apósito de poliuretano, transparente y adhesivo, impermeable al agua y a la humedad, adaptable a cualquier zona y extensible. Usar con precaución en piel frágil.

Indicaciones: Heridas superficiales, como son rozaduras, quemaduras menores, cortes y abrasiones, alrededor de estomas y bolsas de ostomía, como apósito secundario, en colonización baja con exudado escaso.

Frecuencia de cambio: Cada 7 días.



Código LBF	Código CM	Medidas	Empaque
037-04197	1333380	6 cm x 7 cm	1/100
037-04195	1387338	10 cm x 12 cm	1/50
037-04196	1399740	12 cm x 25 cm	1/20



TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

RENASYS^{\$\limes\$}



GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS



MÖI NIYCKE HEAITH CARE



MEJORANDO LOS RESUITADOS EN SALUD

Diseñamos y proveemos soluciones médicas para mejorar los resultados del sector salud tanto en el hospital como en el domicilio.

Empresa líder en el Cuidado de Heridas a nivel mundial, fundada en Suecia en 1849.







www.molnlycke.lat



csc.chile@molnlycke.com

DISTRIBUIDORES

Cobertura Nacional y Venta a Particulares

eq.cl
sur.cl
sur.cl
eriosur.cl
riosur.cl



TERAPIA DE OXIGENACIÓN


GRANULOX

Descripción del Producto: Spray oxigenante. Contiene hemoglobina altamente purificada que toma moléculas de oxígeno del ambiente y se distribuye por el exudado de la herida. El aporte de oxígeno al lecho de la herida reduce el tiempo de cicatrización, disminuye el esfacelo, reduce los niveles de dolor del paciente y los costes de enfermería.

Indicación: Heridas crónicas, como úlceras venosas, úlceras arteriales y/o mixtas, úlceras de pie diabético, cicatrización por segunda intención de heridas quirúrgicas y úlceras por presión. Heridas con carga microbiana y con esfacelo.

Frecuencia de Cambio: Aplique en cada cambio de apósito, como mínimo, cada 3 días. Rinde 30 aplicaciones. Cada pulverización entrega 0,4ml (4x4cm aprox). Contiene 5 cabezales pulverizadores de recambio.



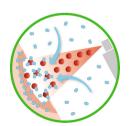

Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
GX010	SPRAY 12 ML	1	-



LIMPIADOR DE HERIDAS

GRANUDACYN

Descripción del Producto: Solución de irrigación para la limpieza y humectación de heridas. Contiene ácido hipocloroso/hipoclorito de sodio (HOCl/NaOCl), hipotónico para promover la osmosis y ruptura celular y control del biofilm. Facilita la extracción mecánica de residuos celulares y microorganismos, pH neutro, no citotóxico ni irritante. Reduce el mal olor de las heridas. Aplicar con gasa no tejida hasta por 5 minutos. No requiere enjuague.

Indicación: Heridas o úlceras con infección o colonización crítica. Heridas con cartílagos, tendones, ligamentos o huesos. Quemadu-

ras de hasta segundo grado. Úlceras inducidas por radiación. Fístulas y abscesos. Cavidades como oídos, nariz, garganta.

Frecuencia de Uso: En cada curación en infección o colonización crítica. Adecuado para uso multipacientes, por 60 días (solución). Comienzo de acción: 30 segundos- 5 minutos.



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
360100	250 ml solución spray	1	1652052
360101	500 ml solución	1	1659616
360102	1000 ml solución	1	`_
360108	100 gr gel spray	1	1652051
360107	50 gr gel	1	`_





BACTERICIDA, ESPUMA CON PLATA IÓNICA



MEPILEX AG

Descripción del Producto: Apósito absorbente de espuma de poliuretano, sulfato de plata y carbón activo. Film exterior semioclusivo y una película de suave silicona con Tecnología Safetac como capa de contacto con la herida que actúa sellando los bordes de la herida y minimizando el riesgo de maceración.

Indicación: Manejo de heridas infectadas con un nivel de exudado moderado-abundante como por ejemplo: úlceras vasculares, quemaduras, pie diabético, etc.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas, según saturación del apósito.



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
287110	10 x 10cm	5	1299438 / 1654012
287210	10 x 20cm	5	1336214 / 1662658
287310	15 x 15cm	5	1336216
287410	20 x 20cm	5	1336219 / 1662659
287510	20 x 50cm	2	1336221



ABSORBENTE . ESPUMA CON SILICONA

MEPILEX



Descripción del Producto: Apósito absorbente de espuma de poliuretano, film exterior semioclusivo y una película suave de silicona con Tecnología Safetac como capa de contacto con la herida que posee una microadherencia selectiva (evita adherencia al lecho húmedo de la herida y se adhiere suavemente a la piel perilesional seca), sellando los bordes de la herida y minimizando el riesgo de maceración. Absorbe eficazmente incluso bajo compresión. Debe fijarse a los bordes sanos perilesionales al menos 1-2 cm. Puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. También se puede utilizar para las zonas de apoyo.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días. En zonas de apoyo hasta 7 días



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
294100	10 x 10cm	5	1336207
294299	10 x 20cm	5	1336208
294300	15 x 15cm	5	1336210
294400	20 x 20cm	5	1336213
294500	20 x 50cm	2	-





ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA



MEPILEX BORDER /SACRUM/HEEL

Descripción del Producto: Espuma de diseño exclusivo de 5 capas probado clínicamente con Safetac®, capa de contacto que minimiza el dolor y permite reposicionamiento. Disponible en una amplia gama de formas y tamaños.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. Prevención de zonas de apoyo.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días según saturación del apósito, como prevención por 7 días.

	Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
BORDER	295200	7,5 x 7,5m	5	1334712
	295300	10 x 10cm	5	1521380
	295400	15 x 15cm	5	1334705
30R	295600	15 x 20cm	5	1334710
_	295800	10 x 20cm	5	1336229
	295850	10 x 25cm	5	1336230
Σ	282000	18 x 18cm	5	1299440 1654013
SACRUM	282400	23 x 23cm	5	1336245
SA	282410	22 x 25cm	10	1830599
	282010	16x20 cm	10	1830600
HEEL	283250	18,5 x 24 cm	5	1652053
	288100	13 x 20cm	5	1299436













33



ABSORBENTE. ESPUMA HIDROFÍLICA EXTRAFINA

MEPILEX LITE /MEPILEX BORDER LITE



Descripción del Producto: Apósito extrafino y autoadherente de espuma con tecnología Safetac, para heridas con poco exudado. Su diseño aporta comodidad, especialmente eficaz para zonas complicadas como pies, manos y dedos. Atraumático en el cambio de apósitos.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado escaso. Versión con bordes ideal para prevención de lesiones o protección de piel, bajo dispositivos.

Frecuencia de Cambio: Uso preventivo cada 5 a 7 días.



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
281000	4 x 5cm	10	1299441
281100	5 x 12,5cm	5	1336243
281200	7,5 x 7,5cm	5	1336244
281300	10 x 10cm	5	1336241
281500	15 x 15cm	5	1336242
284390	15 x 15cm	5	1336249
284000	6 x 8,5cm	5	-
284100	10 x 10cm	5	-
	281000 281100 281200 281300 281500 284390 284000	281000 4 x 5cm 281100 5 x 12,5cm 281200 7,5 x 7,5cm 281300 10 x 10cm 281500 15 x 15cm 284390 15 x 15cm 284000 6 x 8,5cm	281000 4 x 5cm 10 281100 5 x 12,5cm 5 281200 7,5 x 7,5cm 5 281300 10 x 10cm 5 281500 15 x 15cm 5 284390 15 x 15cm 5 284000 6 x 8,5cm 5



BACTERICIDA, POLIVINILO CON PLATA IÓNICA

EXUFIBER AG

Descripción del Producto: Apósito de fibras de polivinilo de alcohol (PVA) y sulfato de Ag+ que permite manejo de infección y biofilm. En contacto con el exudado de la herida, se gelifica, lo que crea el medio ambiente óptimo para la cicatrización de las heridas. Gran poder de integridad (permite retiro en una sola pieza). Gran capacidad de absorción y retención (Tecnología Hydrolock).

Indicación: Tratamiento en heridas infectadas cavitadas y con exudado alto, como las úlceras del pie diabético o venosas, las úlceras por presión y heridas guirúrgicas.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
603421	5 x 5 cm	5	1537379
603420	2 x 45 cm	5	1537374
603425	10 x 10 cm	10	1632453
603422	10 x 12 cm	10	1537382
603424	20 x 30 cm	5	1537377
603423	15 x 15 cm	10	1537378



ABSORBENTE, FIBRA DE POLIVINILO

EXUFIBER

Descripción del Producto: Apósito de fibras de polivinilo de alcohol (PVA). En contacto con el exudado de la herida, se gelifica, lo que crea el ambiente óptimo para la cicatrización. Gran poder de integridad (permite retirarlo en una sola pieza). Gran capacidad de absorción y retención (Tecnología Hydrolock). Promueve el debridamiento autolítico por segunda intención. Se puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. También se puede usar en heridas cavitadas.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
603300	5 x 5 cm	10	1537376
603308	2 x 45 cm	5	1537375
603301	10 x 10 cm	10	1632454
603302	15 x 15 cm	10	1537380





BACTERICIDA, HIDROGEL CON PLATA

NORMLGEL AG

Descripción del Producto: Gel amorfo que contiene una solución de NaCl al 0,9% más plata iónica. La composición está basada en agua purificada más cloruro de sodio al 0.9% y goma Xántica,

la cual le da viscosidad al producto. Proporciona un ambiente húmedo adecuado para la curación de la lesión y además permite el desbridamiento autolítico. Destruye el crecimiento de un amplio espectro de microorganismos. No utilizar en piel.

Indicaciones: En heridas o úlceras con infección y exudado escaso. También se puede utilizar en músculo, tendón o hueso expuesto.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código	N	1edidas	Unidad de venta	ID CM
350450	45 gr		10	1334880



HIDRATANTE. TUL DE SILICONA

MEPITEL ONE



Descripción del Producto: Suave lámina de contacto de silicona (Safetac), minimiza el trauma y dolor. Adaptable, sin adherirse al lecho húmedo de la herida, para que pueda retirarse con facilidad y sin dañar la piel. Protege el tejido en formación y la piel sana, optimizando la cicatrización. Sella los márgenes de la herida para impedir las fugas laterales de exudado y proteger la piel de la maceración. El apósito debe traspasar 1 a 2 cm del borde de la herida.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja y exudado escaso. También puede ser usado como apósito secundario, para proteger apósitos primarios como hidrogel o colágenos.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días como apósito primario. Como apósito secundario, su cambio depende de las características del apósito primario.



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
289100	5 x 7,5 cm	10	1332375
289300	7,5 x 10 cm	10	1299444 / 1655947
289500	10 x 18 cm	10	1332371
289700	17 x 25 cm	5	1332373





HIDRATANTE, LÁMINA DE SILICONA PARA CICATRICES HIPERTRÓFICAS



MEPIFORM

Descripción del Producto: Es una lámina autoadherente de silicona para el manejo de cicatrices. La capa con Safetac permite reducir el dolor y el traumatismo en los pacientes. Se puede retirar, ajustar y dejar colocado durante varios días. Es fino, flexible y discreto para que pueda llevarlo mientras realiza sus actividades diarias.

Indicación: Prevención y tratamiento de cicatrices hipertróficas.

Frecuencia de Uso: Usar durante las 24 horas del día, retirar durante la ducha o el baño. Los mejores resultados se darán después de 2-4 meses de tratamiento.





Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
293199	4 x 30 cm	5	1299434
293299	5 x 7,5 cm	5	1336202
293400	10x 18 cm	5	1334695



CINTA DE FIJACIÓN. CINTA DE SILICONA

MEPITAC



Descripción del Producto: Cinta de fijación atraumática para la piel. Si es necesaria una inspección de la zona o una recolocación, puede retirarse y volverse a fijar. Ideal para pacientes con la piel frágil o sensible y para pacientes que requieren una repetida aplicación y retirada de la fijación en la misma zona. Permeable a gases.

Indicación: Fijación de dispositivos médicos como drenajes, tubos, electrodos, cánulas IV y apósitos. Ofrece una protección suave para

la piel cuando se utiliza debajo de dispositivos médicos como por ejemplo tubos, mascarillas. No está recomendado en la fijación de sistemas de soporte vital.

Frecuencia de Uso: Permite su uso hasta 10 días, manteniendo su adhesividad al reposicionar.



Código	Medidas	Unidad de venta	ID CM
298300	2c m x 3 mt	1	1299548
298400	4 cm x 1,5 mt	1	1340042



Es la capa de contacto original con silicona

Características y Beneficios:

- Microadhesión Selectiva: Adhesión a piel sana y no se adhiere al lecho húmedo de la herida
- √ Reducción del Dolor y Trauma
- √ Protección: Al tejido neoformado y la piel perilesional
- √ Minimiza el Riesgo de Maceración: Sella los bordes
- √ **Permite Reposicionarse:** sin perder la adhesividad suave.



PRODUCTOS CON TECNOLOGÍA SAFETAC	Tij	Tipo Producto		Fase Cicatrización		
Nombre Comercial	Espuma	Lámina Contacto	Cinta	Inflamación	Granulación	Maduración
MEPILEX AG	х			х		
MEPILEX BORDER AG	X			Х		
MEPITEL AG				Х		
MEPILEX	Х			Х	Х	
MEPILEX BORDER	х			Х	Х	
MEPILEX BORDER FLEX	х			Х	Х	
MEPILEX BORDER SACRUM	х			Х	Х	
MEPILEX BORDER HEEL	X			X	X	
MEPILEX BORDER LITE	х				X	
MEPILEX LITE	X			X	X	
MEPILEX TRANSFER	X			Х	X	
MEPITEL ONE		х		Х	X	Х
MEPITEL		X			X	X
MEPIFORM		X				X
MEPITAC			X			Х

15

GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS

1

(III)ConvaTec



Cambiando la vida de las personas con las que tenemos contacto





Convatec Chile



www.convatec.cl



@convatecchile



convatec.chile@convatec.com



Convatec Región Sur



+56 2 2840 5200



Convatec Chile



Av. Andrés Bello 2325, Oficina 8, Providencia. Santiago

Contacto Ventas



Región	Representante de Ventas	
XV - I - II	Patricio Cabello	+56 9 6394 7260
	patricio.cabello@convatec.com	
III - IV	Eduardo Moreno	+56 9 9224 1409
	eduardo.moreno@convatec.com	
V	Cristián Lisboa	+56 9 6193 3619
	cristian.lisboa@convatec.com	
RM	Danae Alarcón	+56 9 4011 7868
	danae.alarcon@convatec.com	
RM	Rebeca Carrasco	+56 9 6394 6563
	rebeca.carrasco@convatec.com	
RM	Roxanna Gianini	+56 9 6122 6396
	roxanna.gianini@convatec.com	
RM	Sebastián Henríquez	+56 9 4419 1220
	sebastian.henriquez@convatec.co	om
RM	Víctor Antoranz	+56 9 4268 5876
	victor.antoranz@convatec.com	
RM - VI	Javier Araya	+56 9 4419 1221
	javier.araya@convatec.com	
VIII	José Canales	+56 9 6193 3540
	jose.canales@convatec.com	
VIII - IX	Rafael Figueroa	+56 9 4493 6771
	rafael.figueroa@convatec.com	
XIV - X -	Christian Aburto	+56 9 4268 5877
XI - XII	christian.aburto@convatec.com	
ARGEN-	Santiago Tomas	+54 9 1153879003
TINA	santiago.tomas@convatec.com	

Nuestras tecnologías son patentadas y poseen más de 365 evidencias clínicas, con rendimiento superior comprobado para acelerar el proceso de curación. Estamos presentes en más de 100 países.





BACTERICIDA, CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA



Descripción del Producto: Es un apósito suave, estéril, hecho de dos capas de carboximetilcelulosa sódica impregnadas con un 1.2% de plata iónica y fórmula antibiofilm, potenciada con EDTA y BeCl, que exponen a las bacterias a los efectos de la plata iónica destruyendo las biopelículas. Extra absorbente.

Indicación: Heridas infectadas y con riesgo de infección, con alto contenido microbiano en heridas de difícil cicatrización. Prevención y tratamiento del biofilm.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas, según Normas Ministeriales y hasta lo establecido por el fabricante



Código CVT	Tamaño	Presentación	ld Conv. Marco
413566	5x5 cm	Caja 10 unidades	1323247
416567	10x10 cm	Caja 10 unidades	1323244
413568	15x15 cm	Caja 5 unidades	1323245
413571	Mecha 2x45 cm	Caja 5 unidades	1323248





ABSORBENTE, CARBOXIMETILCELULOSA



Descripción del Producto: Apósito compuesto de una doble capa de carboximetilcelulosa de sodio, cosido con hilo Tencel (con fibra de refuerzo). Absorbe grandes cantidades de exudado, creando un gel suave y cohesivo que se adapta estrechamente a la superficie de la herida mientras mantiene un ambiente húmedo que ayuda a eliminar el tejido necrótico (desbridamiento autolítico por segunda intención).

Indicación: Herida o úlcera con colonización baja con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas, según Normas Ministeriales y hasta lo establecido por el fabricante.



Código CVT	Tamaño	Presentación	ld Conv. Marco
420672	10 x 10 cm	Caja 10 unidades	1338487
420673	15 x 15 cm	Caja 5 unidades	1338490
420671	5x5 cm	Caja 10 unidades	



www.convatec.cl +56 2 2840 5200

convatec.chile@convatec.com

5

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA

AQUACEL[™] Foam

Descripción del Producto: Apósito estéril, compuesto por una espuma hidrofílica y tecnología hidrofibra, que permite atrapar exudado, garantizando la no maceración de la piel.

Presentación con adhesivo cuenta con bordes de silicona, no oclusivo, de fácil remoción, que permite visualizar la piel protegida, sin lesionarla.

Indicación: Tratamiento de heridas agudas y crónicas con colonización baja y exudado moderado.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas, según Normas Ministeriales y hasta lo establecido por el fabricante.

Código	Tamaño		Presenta- ción	ld Convenio Marco
No Adhe	esivo			
420633	10x10 cm	aja	10 uds.	1323250
420635	15x15 cm	ပီ	5 uds.	1344191
Adhesiv	0			
420680	10x10 cm		10 uds.	1339668
420619	12.5x12.5 m	Saja	10 uds.	1339671
420625	Talón 20x14 cm	ල	5 uds.	1339676
421579	Sacro PRO		5 uds.	1517260









PROTECTOR CUTÁNEO

ESENTA™

Descripción del Producto: Barrera protectora cutánea en spray para piel sensible, no irritante y flexible. Crea una película impermeable a efluentes corrosivos. No produce la acumulación de película sobre la superficie cutánea, dejando respirar la piel. Compuesto por Copolímeros de siloxano (siliconas).

Indicación: Aplicar en pieles con eritema y maceración, principalmente. También se puede utilizar en todo tipo de piel incluso en pieles sensibles. Es de fácil aplicación, sin fragancia e indolora. Aplicar a unos 10 cm de la piel.

Frecuencia de Uso: Es recomendable repetir la aplicación cada 12-72 horas, en función de las condiciones en que se encuentra la superficie de la piel.



Código CVT	Tamaño	Presentación Spray
423286	28 ml	1 unidad
423288	50 ml	1 unidad



HIDRATANTE, HIDROGEL AMORFO

DUODERM®

Descripción del Producto: Hidrogel amorfo a base de Carboximetilcelulosa Sódica-Pectina y Agua. Hidrata el tejido seco favoreciendo el ambiente húmedo fisiológico favoreciendo la formación de tejido de granulación. Actúa como desbridante autolítico al activar a través de la humedad las enzimas proteolíticas del paciente.

Indicación: En heridas y úlceras con colonización baja con exudado escaso.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas, según Normas Ministeriales y hasta lo establecido por el fabricante.



Código CVT	Tamaño	Pre	sentación	ld Convenio Marco
187990	15 grs.	<u>_</u> ë	10 uds.	1299726
187987	30 grs.	0	30 uds.	1338897





SISTEMA COMPRESIVO, BOTA DE UNNA

FLEXI-DRESS

Descripción del Producto: Venda de gasa impregnada con óxido de zinc no solidificable para terapia de compresión reducida (Bota de Unna). Contiene glicerina, aceite de resino y vaselina, permitiendo que la piel periulceral permanezca humectada conservando un medio ambiente húmedo, favoreciendo la epitelización. La venda proporciona una compresión de 20-25 mmHg que favorece el retorno venoso a través de una terapia de compresión reducida.

Indicación: Tratamiento de úlceras vasculares mixtas, venosas y edemas linfáticos con ITB mayor a 0.5.

Frecuencia de Cambio: Máximo 7 días, dependiendo de la periodicidad de las curaciones



Código CVT	Tamaño	Presentación	Id Convenio Marco
650941	10,2 x 914,4 cm	Caja 1 ud.	1300155





SISTEMA COMPRESIVO, VENDA DE UNA CAPA

SurePress[®]

Descripción del Producto: Venda de alta compresión graduada. Compuesta de algodón/viscosa, nylon y lycra, con una línea central amarilla que permite el posicionamiento de la venda en un 50% de su anchura en cada vuelta y dos indicadores de extensión rectangulares, que se transforman en cuadrado al tensionar la venda, para extremidades inferiores de diferente tamaño. Entrega 30mmHg. Se aplica sobre apósito secundario. Venda lavable y reutilizable hasta por 20 veces.

Indicación: Terapia compresiva para el tratamiento de úlceras venosas y linfedemas con ITB de 0.8 a 1.0

Frecuencia de Cambio: Periodicidad de cambio depende de la cantidad de exudado y las características del apósito utilizado.



Código CVT	Tamaño	Presentación	Id Convenio Marco
650947	10 x 3 mts	Caja 1 unidad	1300156





TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA A VELO TM Negative pressure, positive power

Descripción: Sistema de terapia de presión negativa portable, sin cánister, combina la terapia de presión negativa y tecnología Hydrofiber para un óptimo tratamiento de heridas. El sistema mantiene una presión de 80mmHg de forma continua. La bomba es desechable y tiene una duración de 30 días. La capacidad de absorción y retención de la Tecnología Hydrofiber® garantiza que el exudado permanezca retenido sin retornar a la herida.

Indicaciones: Heridas de baja complejidad y de hasta 2 cm de profundidad, con exudado leve a moderado.



ICC		Medida / Presentación	ld Conv. Marco
422285 421552	a	+ 1 caja de apósitos (5 uds.) 16x16 cm	1593934
422285 421553	a Avelle	+ 1 caja de apósitos (5 uds.) 16x21 cm	1593928
422285 421554	Bomba	+ 1 caja de apósitos (5 uds.) 12x21 cm	1593922
422285 421555	_	+ 1 caja de apósitos (5 uds.) 12x31 cm	1593920

GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS

1

AURGO MEDICAL Healing people®



Urgo Medical es una empresa global de cuidado de heridas que ofrece una gama de innovadores apósitos, vendas de compresión, entre otros productos, diseñados para mejorar la cicatrización de las heridas y la calidad de vida de los pacientes.

Nuestra misión consiste en aportar soluciones innovadoras y eficaces para la cicatrización de heridas que faciliten el trabajo de los profesionales de la salud y mejoren la calidad de vida de los pacientes.

Nuestros productos cuentan con tecnologías patentadas, demostrando su efectividad en más de 55 estudios clínicos de alta evidencia con sobre 60.000 pacientes.













www.urgomedical.com



customerservice@cl.urgo.com



+56 225443333

Contacto Ventas





Desde 2017, Urgo Medical distribuye directamente a instituciones públicas y privadas con la razón social Sociedad Importadora Optivision Limitada. Nuestra red comercial cubre todo Chile.

Nuestros productos están disponibles en Convenio Marco, a proveedor Vitalsec. Para mayor información ingresa escaneando este código QR





LIMPIADOR DE HERIDAS

vashe® wound solution



Descripción del Producto: Vashe es una solución limpiadora natural de Ácido Hipocloroso (HClO) en una concentración de 330 ppm. que consigue una limpieza en un corto tiempo de acción, de amplio espectro y no citotóxica. Su formulación patentada con Acido Hipocloroso como su único principio activo, presenta un pH patentado 5.5 el mismo que la piel, el cual favorece la cicatrización.

Indicaciones: En heridas o úlceras con infección o colonización crítica. Empapar una gasa no tejida en Solución Limpiadora Vashe, y aplicar en el lecho de la herida, dejando actuar por 3 a 5 minutos. Secar el excedente y continuar con el cambio de apósito. No requiere enjuague posterior.

Frecuencia de Cambio: Aplicar en cada curación



Nombre	Presentación	Uds.	ld Urgo	ld Conv. Marco
VASHE	118 ml	1	VA000312	1378267
Solución	118 ml	24	VA000312	1647489
limpiadora de Acido	250 ml	12	VA000313	1377303
hipocloroso y	1 lt	1	VA000322	1378263
pH 5.5	1 lt	6	VA000322	1377305





REGENERADOR, INHIBIDOR DE LA METALOPROTEASA



UrgoStart

Descripción del Producto: La gama UrgoStart se compone de la tecnología patentada TLC — NOSF (partículas de CMC, componentes lipídicos y factor nano-oligosacárido, también llamado octasulfato de sacarosa) que ha demostrado reducir el tiempo de cicatrización en estudios de alta evidencia, gracias a su mecanismo de acción: reducción del exceso de Metaloproteasas de matriz lo que disminuye la destrucción del tejido, y por consecuencia pro-

moción de la angiogénesis, restaurando el proceso de cicatrización. Se puede recortar y adaptar según la lesión, compatible con otros apósitos secundarios y sistemas compresivos.

Indicaciones: En úlceras con colonización baja con exudado bajo a moderado. Ejemplo: Úlceras de pie diabético, úlceras vasculares y úlceras por presión.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado, generalmente cada 48-72 hrs.



Nombre	Presentación	Tamaño	ld Urgo	Id Convenio Marco
UrgoStart Contact	Tull flexible de	10x10 cm	UR550278	1630888
Contact	poliéster	5x7 cm	UR550276	1630889
UrgoStart	Espuma hidrofílica	10x10 cm	UR506473	1632712



BACTERICIDA, CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA

Urgo Clean Ag



Descripción del Producto: Gracias a su exclusiva composición de fibras poliabsorbentes y matriz TLC-Ag (partículas de CMC, componentes lipídicos y sulfato de plata), combate la infección local de manera integral con una acción combinada antimicrobiana, antibiofilm y de limpieza completa por medio de un desbridamiento electrostático, manteniendo el ambiente húmedo y una retirada atraumática.

Se puede recortar. Aplicar el lado microadherente sobre la herida. Al retirar el apósito se puede apreciar un gel que es debido a la propia gelificación de las fibras poliabsorbentes en contacto con el exudado, necesario para su función de limpieza.

Indicaciones: Úlceras y heridas exudativas con infección local o colonización crítica con sospecha de biofilm.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado, generalmente cada 24-48 hrs.

Nombre	Presentación	Tamaño	ld Urgo	ld Convenio Marco
UrgoClean Ag	Apósito lípidocoloide de Fibras po- liabsorbentes con plata	10 x 10 cm	UR551978	1560395







ABSORBENTE, CARBOXIMETILCELULOSA





Descripción del Producto: Las fibras poliabsorbentes proporciona una limpieza completa para garantizar la cicatrización de la herida. Al mismo tiempo cuenta con la matriz cicatrizante TLC* formada por partículas de carboximetilcelulosa y componentes lipídicos, mantiene el ambiente húmedo, favorece la proliferación de

fibroblastos y permite una retirada atraumática e indolora para el paciente. Se puede recortar. Aplicar el lado microadherente sobre la herida.

Indicaciones: Heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado o abundante. El formato mecha se recomienda para heridas cavitadas.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado, generalmente cada 48-72 hrs.



d)				
Nombre	Presentación	Tamaño	ld Urgo	Id Conv. Marco
UrgoClean	Apósito Lípidocoloide de fibras poliabsor-	10 x 10 cm	UR503946	
	bentes	6 x 6 cm	UR503947	1595980
UrgoClean Mecha	Mecha de fibras poliabsorbentes	2,5 x 40 cm	UR550181	1595982



BACTERICIDA, TUL CON PLATA IÓNICA

Urgo**Tul** Ag/Silver



Descripción del Producto: Es una malla de contacto con acción antimicrobiana efectiva que combate la infección local y colonización critica(aplicar solo en el tejido necrótico o esfacelo) por medio de la acción de la matriz cicatrizante TLC — Ag, compuesta por partículas de carboximetilcelulosa, componentes lípidicos y sulfato de plata, manteniendo el ambiente húmedo y permitiendo una retirada atraumática e indolora, mientras ejerce su acción antimicrobiana de amplio espectro.

Indicación: Tratamiento local de heridas crónicas (úlceras vasculares, úlceras por presión y úlceras de pie diabético) y agudas (quemaduras parciales, dermoabrasiones, heridas traumáticas, heridas post-quirúrgicas) en riesgo o con signos de infección local.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado, generalmente cada 24-48 hrs.



Nombre	Presentación	Tamaño	ld Urgo	ld Conv. Marco
oTul g	Tul lípidocoloide	10 x 12 cm	UR508393	1266293
UrgoTul Ag	con plata	15 x 20 cm	UR508394	1381178





SISTEMA COMPRESIVO MULTICAPA, VENDA DE DOS CAPAS





Descripción del Producto: Sistema de compresión multicomponente, compuesto de una venda de tracción corta K-Tech que actúa cuando el paciente está en movimiento y otra de tracción larga cohesiva K-Press que actúa en reposo. Gracias a sus indicadores de presión en ambas vendas, se asegura la presión terapéutica de 40 mmHg. en el tobillo desde el primer día, al mismo tiempo que guía el correcto posicionamiento del vendaje. Utilizar el tamaño adecuado en función de la circunferencia del tobillo (18-25 cm. / 25-32 cm.). Aplicar primero la venda K-Tech (blanca), seguida de la venda K-Press (café), estirando ambas vendas hasta conseguir

un círculo perfecto desde el tobillo hasta la rodilla.

Indicaciones: Úlceras venosas, edema venoso y linfedema.

Frecuencia de Cambio: En función de la cantidad de exudado y el apósito primario, pudiéndose dejar hasta 7 días si éste lo permite. Se recomienda hacer el primer cambio a las 24-48 hrs



Nombre	Presentación	Talla	ld Urgo	ld Conv. Marco
Urack2	Sistema Com- presivo Multi- componente con	18 x 25 cm	UR191584	1329970
UrgoK2	indicadores de presión	25 x 32 cm	UR191585	1614179



9 HIDRATANTE, ÁCIDO GRASO HIPEROXIGENADO

Corpitol



Descripción del Producto: Solución tópica compuesta de ácidos grasos esenciales hiperoxigenados en un 99% (un 60% de ácido linoleico), vitamina E (Tocoferol) y perfume de anísy libre de alcohol. Corpitol permite reforzar la resistencia de la piel, proteger y evitar la deshidratación cutánea, estimular la renovación celular de la piel y favorecer la microcirculación preservando la oxigenación de los tejidos.

Indicación: Tratamiento y prevención de lesiones por presión y eritema cutáneo, pieles secas y deshidratadas, pieles frágiles, pigmentadas, pieles con poca resistencia cutánea y deterioro trófico de la piel.

Frecuencia de Aplicación: 1 a 2 pulverizaciones en las zonas de la piel a tratar o prevenir, y frotar suavemente con las puntas de los dedos hasta su completa absorción. Repetir 3 a 4 veces al día, o tan a menudo sea necesario.



Nombre	Presentación	Tamaño	ld Urgo	ld Conv. Marco
Corpitol	Aceite de ácidos grasos esenciales hiperoxigenados con Tocoferol	20 ml	UR504427	Disponible vía Licitación, Compra Ágil o Trato Directo.





HIDRATANTE, TUL LIPÍDICO





Descripción del Producto: Los apósitos de la gama UrgoTul son los apósitos ideales para la cicatrización de una herida, al crear el ambiente más favorable para que los tejidos cicatricen, al contar con la matriz cicatrizante TLC, formada por partículas de carboximetilcelulosa y componentes lipídicos, manteniendo el ambiente húmedo y permitiendo una retirada atraumática e indolora. Se encuentran en formato de tul sintético, espuma microadherente y espuma superabsorbente con borde siliconado (ambas con absorción vertical).

Indicación: Está indicado para el tratamiento de heridas agudas y úlceras en fases de granulación y epitelización, como también para el manejo de la Epidermólisis Bullosa (EB). Los formatos de espuma pueden ser utilizados también como apósitos secundarios para control de exudado y también en la prevención de lesiones por presión.

Uso: Frecuencia de cambio en función de la cantidad de exudado, generalmente cada 48-72 hrs.

Nombre	Presentación	Tamaño	ld Urgo	ld Conv. Marco
UrgoTul	Tul lípidocoloi- de de poliéster	5 x 5 cm	UR508537	1595984
Urg	de de pollester	10 x 10 cm	UR508538	1595985
Urgo Tul Absorb	Espuma lípidocoloide microadherente	10 x 10 cm	UR503899	632711
- Ser	Espuma lípi- docoloide con	13 x 13 cm	UR550867	1359853
UrgoTul Absorb Sorb Border	docoloide con borde adhesivo de silicona	20 x 20 cm (Sacro)	UR550869	1381180




UrgoTul Absorb
UrgoTul Absorb
Border





GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS



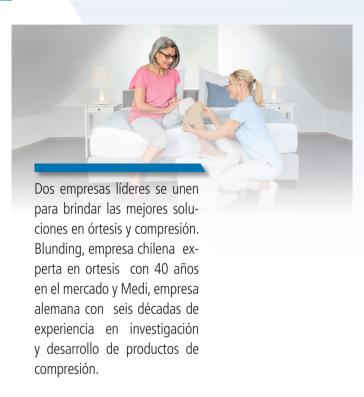

Contacto

Mirlen Ortega Enfermera coordinadora de ventas



+562 2350 5942



mortega@blunding.com

Locales Medishop



Tabancura 1091, local 2, Vitacura, tel. 22 793 7388 Salvador 714, Providencia, tel. 22 269 6419 Apumanque, local 288, tel. 22 224 4107

Atención a pacientes



Casa Salvador Salvador 651, Providencia, tel. 22 839 0596



www.casasalvadorchile.com

Despachos a todo Chile







MEDICIÓN DE ÍNDICE TOBILLO BRAZO

MESI ABPI MD

Descripción: Dispositivo de medición del índice tobillo - brazo, rápido, preciso y objetivo, permite el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica (EAP).

Indicaciones:

- Evaluar el flujo sanguíneo arterial antes de la terapia de compresión.
- Descartar EAP/ EAMI en pacientes con heridas en la extremidad inferior.
- Evaluar el potencial de cicatrización de heridas.



CUIDADO DE HERIDAS EN 3 PASOS



Paso 1	Paso 2	Paso 3
Obtener medición de ABI	Determinar tipo de úlcera	Asignar tratamiento
0.8 < ABI	Úlcera venosa	Terapia de compresión
0.51 < ABI < 0.79	Úlcera mixta	Terapia de compresión ajustada. Posible riesgo de EAP
< ABI 0.51	Úlcera arterial	Tratamiento del paciente maximizando la perfusión en las piernas. Alto riesgo para la EAP



PLANTILLA INTERIOR EXTRAÍBLE CON SISTEMA LEGO + REPUESTO

KIT ZAPATO DE DESCARGA ANTEPIÉ ABIERTO

Descripción: Zapato post quirúrgico para la descarga del antepié, con punta abierta, cuenta con 2 plantillas lego que contienen hexágonos removibles con velcro para adaptar a la circunferencia y tamaño de la úlcera. Suela resistente, ligera y antideslizante. Apto para pie derecho e izquierdo.

Indicaciones:

- Post operatorio para la estabilización y la descarga
- Post operatorio en caso de fasceítis plantar
- Para tratamiento de heridas





Talla	Medida calzado	ID Blunding
S	34-35	MI-18 KIT
M	36-39	MI-18 KIT
L	40-43	MI-18 KIT
XL	44-46	MI-18 KIT

4



PLANTILLA INTERIOR EXTRAÍBLE CON SISTEMA LEGO + REPUESTO

BOTA DE DESCARGA CORTA O LARGA

Descripción: Órtesis conformada por 2 plantillas lego que contienen hexágonos removibles con velcro para adaptar a la circunferencia y tamaño de la úlcera plantar. Reduce la descarga e inmoviliza el pie. Apto para pie derecho e izquierdo.

Indicaciones:

- Úlceras plantares
- Pie diabético
- Pie de Charcot





	Talla	Medida calzado	ID Blunding	ID Conv. Marco
∠.	S	34-35	MI-177	
BOTA LARGA	М	36-39	MI-177	1656495
_ I M_	L	40-43	MI-177	1000490
80	XL	44-46	MI-177	
⋖	S	38-39	MI-170	
BOTA CORTA	М	39-42	MI-170	1331721
IA O	L	43-44	MI-170	1331721
80	XL	45-46	MI-170	

www.blunding.com ⊕ +56 223505942 ℚ mortega@blunding.com ►

PLANTILLA INTERIOR EXTRAÍBLE CON SISTEMA LEGO + REPUESTO

ZAPATO DE DESCARGA CUIDADO DE HERIDAS

Descripción: Órtesis conformada por dos plantillas lego que contienen hexágonos removibles con velcro para adaptar a la circunferencia y tamaño de la úlcera, plantilla rígida para proteger la flexión y torsión durante el tiempo de uso. Cuenta con cierres de contacto (velcro), que permiten la apertura total del zapato para facilitar la colocación y puede desmontarse la cobetura de la punta para descubrir la zona de los dedos. Apto para pie derecho e izquierdo.



- Úlceras plantares
- Pie diabético
- Post-guirúrgicos





Talla	Medida calzado	ID Blunding	ID Conv. Marco
S	35-37	MI-178	
М	38-40	MI-178	1656488
L	41-43	MI-178	1030400
XL	44-47	MI-178	



ZAPATOS TERAPEÚTICOS

ZAPATOS PARA DIABÉTICO

Descripción: Zapato terapeútico 100% cuero, suela antideslizante, forro interno 100% cuero floater, suave y sin costuras, con suela Rocker antideslizante, talón extra profundo para adaptación de plantillas.

Indicaciones:

- Pacientes diabéticos con riesgo de presentar úlceras plantares, lesiones o alteración de la sensibilidad.
- Pacientes con deformidades en el pie.
- Durante recuperación de lesiones traumáticas en el pie.







SUELA ROCKER BIOMECÁNICA ANTIDESLIZANTE

Talla	ID Blunding	Descripción	ID Conv. Marco
34-46	B-9008	zapato deportivo	
34-46	B-5031	zapato cierre velcro	
34-46	B-5037	zapato con cierre cordón	1267733
36-42	B-5049	zapato con cierre cordón nobuck	1207733
37-42	B-9009	zapato deportivo	
37-42	B-5030	zapato con cierre cordón	





SISTEMAS COMPRESIVOS, BAJA COMPRESIÓN

MAXIS MICRO medi



Descripción: Medias con gradiente de compresión certificada para el tratamiento de insuficiencia venosa, post cicatrización de úlceras venosas y para evitar la recidiva. Disponibles en clase I (18-21 mmHg) y clase II (23-32 mm-Hg).

Indicaciones:

- Úlceras venosas cicatrizadas
- Tratamiento para la insuficiencia venosa
- Úlcera venosa mixta.

www.blunding.com REPRESENTANTE OFICIAL DE MEDI EN CHILE





Talla	Contorno Supramaleoar	ID Blunding	ID Conv. Marco
-	17-19 cm	E-XA40001	
Ш	19-21 cm	E-XA40002	
III	21-23 cm	E-XA40003	
IV	23-25 cm	E-XA40004	1568568
V	25-27 cm	E-XA40006	
VI	27-29 cm	E-XA40007	
VII	29-31 cm	E-XA40008	





SISTEMAS COMPRESIVOS, ALTA COMPRESIÓN

CALCETA COMPRESIVA ULCER KIT

Descripción: Set de 3 calcetas, 2 calcetas con hilos de plata de 20 mmHg. cada una, cuentan con efecto prolongado antibacteriano, la que aporta compresión de 20 mmHg. por la noche. La tercera calceta, es de color beige, entrega los otros 20mmHg., al usar las dos calcetas aportan 40 mmHg. durante el día, asegurando una terapia efectiva y eficiente en el cierre de la úlcera venosa, posee ventana de inspección para medir la perfusión distal. La otra calceta de plata sirve para realizar los cambios en cada curación.



Úlcera venosa activa





Talla	Contorno Supramaleoar	ID Blunding	ID Conv. Marco
	14-20 cm	E-3810001000	
Ш	20-22 cm	E-3810002000	
Ш	22-24 cm	E-3810003000	1345724
IV	24-26 cm	E-3810004000	1343724
V	26-28 cm	E-3810005000	
VI	28-30 cm	E-3810006000	



SISTEMAS COMPRESIVOS, BAJA-ALTA COMPRESIÓN

CIRCAID JUXTA-LITE medi



Descripción: Sistema de compresión inelástica con tarjeta inteligente de regulación de mmHg, ajustable con velcros.

Indicaciones:

- Úlceras Venosas
- **Fdema**
- Motricidad limitada
- Insuficiencia venosa crónica





S E-23023017 Pantorrilla corto S E-23033017 Pantorrilla largo M E-JU15703 Pantorrilla corto M E-23024117 Pantorrilla ancho corto	
M E-JU15703 Pantorrilla corto	033017 Pantorrilla largo
F 22024447 B	5
M F-2302/117 Pantorrilla ancho corto	15703 Pantorrilla corto
M E-23024117 Pantorrilla ancho corto	224117 Pantorrilla ancho corto
M E-23034117 Pantorrilla ancho largo	Pantorrilla ancho largo
L E-23025117 Pantorrilla ancho corto)25117 Pantorrilla ancho corto
XL E-23035117 Pantorrilla ancho largo	935117 Pantorrilla ancho largo

10





céutico con más de 12 años de experiencia, que se dedica a vincular nuevos desarrollos médicos en América Latina. Nuestro propósito es utilizar los últimos avances en ciencia y tecnología para participar en la creación de un mundo mejor y más saludable.

Contacto Ventas











elizabeth.perasic@avalon.com.co



(+569) 94387864 PBX: (+56) 232446990



Bicentenario-3883 Piso 6 Vitacura-Santiago



REGENERADOR, ANTIOXIDANTE REOXCARE® NATURAL DETOX



Descripción del Producto: Única tecnología Antioxidante que neutraliza el exceso de radicales libres en el ambiente de la herida. Reoxcare® detoxifica la herida para permitir que avance en sus etapas hacia la cicatrización.

Indicación:

- En heridas o úlceras con colonización crítica.
- Herida estancada en fase inflamatoria persistente
- Dehiscencias quirúrgicas
- Úlceras de comportamiento neuroisquémico
- Úlceras vasculares con tratamiento de compresión
- Heridas en pacientes con comorbilidades y riesgos de cronificación.

Frecuencia de Cambio: No utilizar en heridas con signos clínicos de infección. Cambios sugeridos, cada 3 a 5 días según necesidad.

Presentación:



Descripción	Componente
Solución antioxidante 10ml	Cúrcuma y NAC
Apósito absorbente 9x4 cm	100% algarrobo





TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA





INNOVACIÓN EN SUCCIÓN Y CONTROL DEL EXUDADO

Descripción del Producto: Sistema digital para el tratamiento de heridas con presión negativa (NPWT) que permite ajustar el nivel de presión y la modalidad de terapia (Constante e intermitente). Gracias a su tecnología Bilumen, Medela entrega presión inteligente y a su vez remueve el exudado de forma dinámica mientras previene bloqueos en la bomba.

Accesorios: Invia Liberty set tubo estéril simple, Esponja hidrofóbica, Y- Conector, canister 0.3 | con solidificador, canister 0.8 | con solidificador, Estuche de transporte, Cargador.

Indicaciones:

- Heridas Crónicas
- Heridas Agudas
- Heridas traumáticas
- Dehiscencias quirúrgicas
- Quemaduras de espesor parcial
- Úlceras (pie diabético, úlceras por presión, insuficiencia venosa)
- Colgajos e injertos
- Tratamiento de incisiones

Frecuencia de Cambio: Cada 48 horas o según protocolo Institucional.





DESBRIDANTE ENZIMÁTICO Nexo Brid® Desbridación y protección avanzada



Descripción del Producto: Biotecnología enzimática para el desbridamiento avanzado de las quemaduras. Nexobrid® es un concentrado de enzimas proteolíticas enriquecidas con bromelina que permiten hacer un desbridamiento completo de las quemaduras mixtas y profundas. Es mínimamente invasivo y de rápida acción.

Indicación:

- Eliminación de escaras en adultos con quemaduras térmicas profundas, parciales y complejas.
- Quemaduras de menos del 15% de la superficie corporal total.

Forma de aplicación:

- 1. Paciente debe recibir sedo-analgesia y/o anestesia, debe realizarse en pabellón o servicio crítico o intermedio.
- Preparar la mezcla del gel y el polvo en forma simultánea o previa máximo 15 minutos tras la realización de la mezcla (5gr para 2,5% SCQ)
- 3. La aplicación de la mezcla deber ser de 1,5 a 3 mm
- **4.** Aplicar vaselina en los límites de la zona a tratar para que sirva de contención.
- Cubrir el producto con un apósito transparente oclusivo estéril más vendaje.

DEBE PERMANECER DURANTE 4 HORAS

Descripción	Componente
Polvo	1 vial de 5 g
Gel	1 frasco de 50 g





REVESTIMIENTO DÉRMICO

SUPRATHEL

Descripción del Producto: Membrana microporosa y absorbible de ácido poliláctico que actúa como sustituto de piel, altamente permeable al oxígeno y al vapor de agua. Proporciona un entorno favorable para la cicatrización de heridas y quemaduras.

Indicación:

- Quemaduras de 2° superficial y profunda
- Abrasiones
- Zonas donantes de injerto
- Epidermólisis Bullosa
- Síndrome de Steven Johnson

Frecuencia de cambio: Solo requiere una aplicación.

Presentaciones:



Descripción	Componente
Membrana de	5 unidades /
9x10 cm	caja
Membrana de	5 unidades /
18x10 cm	caja
Membrana de	5 unidades /
18x23 cm	caja



Helps. Cares. Protects.

Avanzando en el cuidado de la salud por 200 años.



Contacto Ventas



Para llevar la salud hacia adelante, tenemos pasión en lo que hacemos.

Nos esforzamos cada día para ir más allá en la salud, por esto, ya seas profesional sanitario o un apasionado por la salud, estamos abiertos a tus preguntas, comentarios y opiniones.

Despacho a todo Chile



www.latam.hartmann.info



hartmann-chile@hartmann.info



+56 2 3324 0260



BACTERIOSTÁTICO, APÓSITO DE RINGER MÁS PHMB

HYDROCLEAN PLUS

Descripción del Producto: Apósito bacteriostático con función desbridante, contiene solución de ringer y PHMB, eficaz también en el control de carga bacteriana.

No cortar ni dañar mecánicamente. Cubrir la piel circundante con protector cutáneo. Durante el tratamiento puede haber hiperhidratación reversible en la zona de los bordes de la lesión.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización crítica con exuado escaso, moderado o abundante. El desbridamiento atraumático es por métodos hiperosmóticos de irrigación y absorción en

la fase de limpieza del lecho de la herida

Frecuencia de cambio: Su mecanismo único de irrigo - absorción aporta solución de ringer y PHMB por hasta 3 días.



Producto	Dimensiones	Referencia Hartmann	Código Conv. Marco
HydroClean Plus	4 cm	6096023	1527973
	4 x 8 cm P10 K6 2.0	60966053	1824095
	5.5 cm	60966063	1358292
	7.5 x 7.5 cm P10 C6	60966083	1358290
	10 x 10 cm	6096123	1390122
HydroClean Plus mini	3 cm	6096213	
HydroClean Plus cavity	4 cm	6096220	
	7.5 x 7.5 cm	6096283	

www.latam.hartmann.info ⊕ +56 2 3324 0260 ♠ hartmann-chile@hartmann.info ►



ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON HIDROGEL


HYDROTAC

Descripción del Producto: Espuma de poliuretano con matriz de hidrogel que incorpora la nueva tecnología AcquaClear con capacidad de absorber el exudado de la lesión, mientras aporta humedad que favorece la migración de células y una cicatrización mucho más rápida.

El apósito debe sobrepasar uno a dos cm desde el borde de la herida. Se puede cortar.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de cambio: Cada 48 a 72 horas.

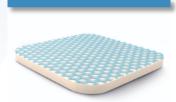

Producto	Dimensiones	Referencia Hartmann	Código Convenio Marco
HydroTac	6 cm round	685849	1549179
HydroTac	10 x 10 cm	685832	1299414
HydroTac	10 x 20 cm	685833	
HydroTac	8 x 8 cm	685810	
HydroTac	12,5 x 12,5 cm	685815	
HydroTac	22 x 22 cm	685827	
HydroTac	18 x 18,5 cm	685624	



LIMPIADOR DE PIEL, ESPUMA LIMPIADORA

MOLICARE SKIN

Descripción del Producto: Espuma de limpieza para piel perilesional, contiene creatina, butano, ácido láctico, perfume y ácidos grasos esenciales y mantiene el PH 5.5 en la piel. Controla la carga bacteriana de la piel expuesta a bacterias de la flora transitoria provenientes de lesiones crónicas, agudas y pacientes incontinentes, manteniendo intacta la humedad, el manto ácido y la función de barrera protectora de la piel.

Agitar antes de usar. Pulverizar directamente sobre la lesión a 20 cm de distancia, dejar actuar y retirar los excedentes sin agua ni jabón.

Indicaciones: Limpieza rápida y suave de la piel perilesional en heridas o úlceras o para la prevención de lesiones cutáneas por humedad y exudado.

Frecuencia de Uso: En cada curación.



Producto	Dimensiones	Referencia Hartmann	Código Convenio Marco
Molicare Skin Espu- ma de limpieza	400 ml	995081	
Molicare skink espuma de limpieza mini	35 ml	995042	





CURETAS PARA DESBRIDAR

PEHA INSTRUMENT

Descripción del Producto: Curetas desechables de acero inoxidable de grado médico de 4 mm de diámetro y para un solo uso. Permiten desbridar de manera segura, rápida y atraumática.

Usar en conjunto al uso de apósitos que induzcan el desbridamiento autolítico o hiperosmótico. No re esterilizar.

Indicaciones: Desbridamiento de tejido esfacelado y/o necrótico.

Frecuencia de Uso: En heridas o úlceras con infección se debe utilizar en cada curación. En colonización crítica, utilizar cuando exista más de 25% de tejido esfacelado o necrótico.



Producto	Dimensiones	Referencia Hartmann	Código Convenio Marco
Peha Instrument: Cureta Fox 14,5cm	4 mm	991013	

GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS

1

BBRAUN

SHARING EXPERTISE



Protegemos y mejoramos la salud en todo el mundo





Cualquier profesional que quiera mejorar la salud de las personas debe examinar las tareas en cuestión y afrontarlas. Debe renovar constantemente sus conocimientos, reconocer nuevas oportunidades, ser apasionado y comprometido para encontrar soluciones costo-eficientes

Contacto Ventas



Nuestro Sharing Expertise nos lleva a tener una cobertura en todo Chile.

Nuestros especialistas técnicos y comerciales estan disponibles para ayudarles en la gestión del paciente de manera preventiva y en curación avanzada.

¡Contáctanos ¡





www.bbraun.cl



bbraun-chile@bbraun.com



+56 224407100

HIDRATANTE, ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS

LINOVERA®

Descripción del Producto:

Solución tópica compuesta por ácidos grasos hiperoxigenados de ácidos grasos esenciales en un 98% y un 2% compuesto por: aloe vera, centella asiática y esencia de romero. Los ácidos grasos hiperoxigenados facilitan la renovación de las células epidérmicas, incrementando la resistencia capilar. Aloe vera y centella asiática, actúan como restauradores capilares y contrarrestan el efecto de los radicales libres. Es de uso tópico y se aplica de forma fácil.

Indicaciones: En pieles descamadas, pigmentadas, frágiles y prevención de lesiones por presión



Frecuencia de Uso: 2 a 3 veces al día o el tiempo que sea necesario para conseguir el objetivo. Para su uso, pulverizar el producto sobre la zona deseada y realizar una extensión del producto facilitando la distribución homogénea de éste.

Código	Descripción	Unidad de empaque	ISP
467936	Linovera® 30 ml	Caja x 20 ud	1141C-1

HIDRATANTE, ÁCIDO GRASO HIPEROXIGENADOS EN EMULSIÓN

LINOVERA® EMULSION

Descripción del Producto: Solución tópica compuesta por ácidos grasos hiperoxigenados de ácidos grasos esenciales en un 98% y un 2% compuesto por: aloe vera, centella asiática, Ginkgo Biloba y esencia de romero.

Los ácidos grasos hiperoxigenados presentes en su formulación, facilitan la renovación de las células epidérmicas, incrementando la resistencia capilar. Aloe vera y centella asiática, actúan como restauradores capilares, restauradores de la circulación capilar

y contrarrestan el efecto de los radicales libres y gracias a nuevos elementos activos presente en su composición como es el caso del Ginkgo Biloba contribuyen a la mantención del tono venoso.

Indicación: Aplicar en pieles sanas, descamadas, pigmentadas donde se deba abarcar una gran superficie, como en las pieles perilesional de las úlceras venosas.

Frecuencia de Uso: Aplicar cada 12 horas



Código	Descripción	Unidad de empaque	ISP
483626	Linovera® Emulsión 50 ml	Caja x 10 unidades	1141C-3

4



GFI HIDRATANTE PARA CICATRICES

LINOVERA® SCAR REPAIR

Descripción del Producto: Es un gel que contiene ácido hialurónico (0,5%) de bajo peso molecular, ayuda a mejorar la elasticidad de la piel y favorece su coloración natural, centella asiática, activa la síntesis de colágeno y actúa sobre el tono vascular y Syricalm, combinación de extractos vegetales que reduce el efecto inflamatorio, la tirantez y la rojez y restablece la barrera funcional de la piel.

Indicación: Tratamiento de todo tipo de cicatrices (debidas a cirugía, quemaduras, traumatismos) desde su completo cierre hasta 2 años después.

Frecuencia de Uso: Aplicar el gel dos veces al día, preferiblemente mañana y noche. Extender el gel sobre la piel limpia y seca, realizando un suave masaje con los dedos sobre la cicatriz. Se recomienda el uso de apósitos protectores de silicona (Askina® Scar Repair) que protegen de la exposición a los rayos UV y potencian el efecto del producto.





Código	Descripción	Unidad de empaque	ISP
492384	Linovera Scar Repair Gel Tubo 15 grs – Registro ISP	Caja x 20 unidades	1141C-8





LIMPIADOR DE HERIDAS

PRONTOSAN® SOLUCIÓN

Descripción del Producto: Solución para el lavado y descontaminación de heridas. Esta compuesto por agua purificada, 0.1 % de Betaína y 0.1 % Polihexanida. Se recomienda aplicar una gasa no tejida(gasa con poliéster) en la herida, la que debe sobrepase 2 a 3 cm de la piel perilesional, aplicar el producto y dejar actuar por 10 a 15 minutos. Retirar todo los detritus con una pinza anatómica. Una vez abierto dura 8 semanas o 2 meses sin contaminación.

Indicación: Aplicar en heridas o úlceras con infección o colonización crítica.

Frecuencia de Uso: Aplicar en cada curación.



Código	Descripción	Empaque	ID CM
400591	PRONTOSAN® W solución 350 ml.	Caja x 10 unds	1369920
400484	PRONTOSAN® W solución 40 ml.	Caja x 24 unds	




GEL BACTERIOSTÁTICO

PRONTOSAN® GEL

Descripción del Producto: Gel para la descontaminación e hidratación de las heridas. Esta compuesto por 0,1% Betaina, 0,1% Polihexanida, Glicerol, Agua purificada e Hidroxietilcelulosa. Después de la limpieza de la piel y de la herida, aplicar el gel solo en la lesión, cubrir con un apósito secundario como tul de silicona o también con un bacteriostático para potenciar su efecto.

Indicaciones: Se utiliza en todo tipo de herida que presente colonización critica y exudado escaso moderado.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 días

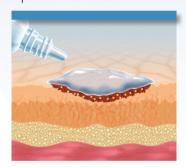

Código	Descripción	Empaque	ID CM
400590	PRONTOSAN® Gel 3ml.	Caja x 20 un	1369925






BACTERICIDA, ESPUMA CON PLATA IÓNICA

ASKINA CALGITROL AG LÁMINA®

Descripción del Producto: Es un apósito estéril compuesto de una matriz de alginato con plata de (141 mg/ 100 cm2) sobre una espuma de poliuretano con alto poder de absorción. Es un apósito tecnológicamente avanzado que incorpora la efectividad de una barrera de iones de plata con la capacidad de absorción del alginato de calcio y la espuma de poliuretano. La disponibilidad inmediata de plata en estado iónico favorece la actividad antimicrobiana.

Indicaciones: En heridas infectadas con moderado a alto nivel de exudado; heridas parciales o profundas, tales como úlceras por presión, úlceras de pie diabético; úlceras venosas y quemaduras de grado dos.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas

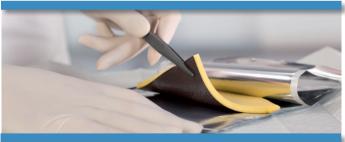

Código	Descripción	Unidad de empaque	ID Conv. Marco
6211010	Askina Calgitrol AG 10 X 10 cm	Caja x10	1299367
6211510	Askina Calgitrol AG 15 X 15 cm	Caja x10	1822616
6212010	Askina Calgitrol AG 20 X 20 cm	Caja x10	1822617
0212010	7 Bitina Cargitro 17 to 20 7t 20 cm	Caja XII	1022017



www.bbraun.cl+56 224407100bbraun-chile@bbraun.com

9

BACTERICIDA, LAMINA DE ALGINATO CON PLATA IÓNICA

ASKINA CALGITROL THIN®

Descripción del Producto: Es un apósito de matriz de alginato de plata iónica presentada entre 2 revestimientos transparentes. La misma matriz de Askina ® Calgitrol Ag (137mg AG/cm2). El apósito puede colocarse con ambos lados mirando hacia el lecho de la herida.

Indicación: Tratamiento de heridas y úlceras de espesor parcial a total con infección como en úlceras por presión, úlceras de pie diabético, quemaduras de segunda intensión, heridas guirúrgicas.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código	Descripción	Unidad de empaque	ID Conv. Marco
6205510	Askina Calgitrol Thin 5 X 5 cm	10 x Caja	1823635
6201010	Askina Calgitrol Thin 10 X 10 cm	10 x Caja	1823636
6202110	Askina Calgitrol Thin 10 X 20 cm	10 x Caja	1822618
6202010	Askina Calgitrol Thin 20 X 20 cm	10 x Caja	1822617

BACTERICIDA, PASTA CON PLATA IÓNICA

10

ASKINA CALGITROL AG PASTA®

Descripción del Producto: Es un apósito estéril que en contacto con la lesión, proporcionan un efecto antimicrobiano de amplio espectro, frente a un gran número de patógenos sin inducir resistencias. La pasta es de color púrpura, característico de Askina Calgitrol Ag[®]. Mantiene un ambiente húmedo para la herida que es conducente a las condiciones naturales de la curación. En una matriz de plata iónica (180mg Ag+/Tubo). Tubo de 15 grs.

Indicaciones: En heridas o úlceras con infección y exudado escaso-moderado. Se puede aplicar en hueso infectado.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.





ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA

ASKINA DRESSIL®

Descripción del Producto: Es un apósito de espuma de contacto con silicona fina, se compone de tres capas diferentes. Una película de poliuretano protectora y muy transpirable que actúa como barrera impermeable y contra las bacterias, una capa de espuma hidrófila adaptable y blanda con una excelente capacidad de absorción y una capa adhesiva de silicona perforada que proporciona una adhesión segura a la piel circundante, permite el paso del exudado a la capa de espuma y ofrece una extracción atraumática.

Indicación: Heridas o úlceras con colonización baja, con exudado moderado a abundante

Frecuencia de Cambio: Cambio cada 3 a 4 días como máximo.



Código	Descripción	Unidad de empaque	ID Conv. Marco
5291010	ASKINA® DRESSIL 10X10 cm	Caja x 10	5291010
5291210	ASKINA® DRESSIL 10X20 cm	Caja x 10	5291210
5292005	ASKINA® DRESSIL 20X20 cm	Caja x 10	5292005



HIDRATANTE, TUL DE SILICONA

ASKINA SILNET®

Descripción del Producto: Es un apósito de contacto de silicona fino, poroso, que se constituye de un tejido no tejido cubierto en ambas caras con una capa suave de silicona. No tóxico, no irritante e hipoalergénico. Debe ser utilizado con un apósito secundario. No contiene látex. La estructura porosa permite el paso vertical de exudado al apósito secundario.

Indicaciones: Para el manejo de una amplia gama de heridas con colonización baja con exudado escaso como: Heridas cortantes, abrasiones, laceraciones, heridas traumáticas, quemaduras 1ro y segundo grado, fijación de injertos, zona dadora de Injertos, heridas post-operatorias.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días



Código	Descripción	Unidad de empaque	ID Conv. Marco
5491605	Askina Silnet 10 X 7.5 cm	10 x Caja	1522151



www.bbraun.cl+56 224407100bbraun-chile@bbraun.com

13

HIDRATANTE, LÁMINA DE SILICONA PARA CICATRICES

ASKINA SCAR REPAIR®

Descripción del Producto: Es un apósito fino, adaptable, reutilizable no estéril compuesto por film exterior laminado no tejido de poliuretano, transpirable y resistente al agua, una capa de gel de silicona que en contacto con la piel se adapta a la superficie de esta y se adhiere de forma segura. Los apósitos de silicona reducen el picor y la sensación de tirantez, son discretos sobre la piel y ofrecen protección UV.

Indicaciones: Tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloides (post operatorio) y puede usarse también en heridas cerradas para la prevención de las cicatrices hipertróficas o queloides tras la cirugía. Está indicado solamente para uso externo.

Frecuencia de Uso: Revisar cada 24 horas adherencia y duración hasta 7 días







Código	Descripción	Unidad de empaque
5691805	ASKINA® Scar Repair 10x18 cm	5 x Caja
5695705	ASKINA® SCAR REPAIR 5x7,5cm	5 x Caja
5691403	ASKINA SCAR REPAIR 2 X 14CM 5 STRIPS	3 x Caja



REMOVEDOR DE ADHESIVO

14

BBRAUN REMOVEDOR ADHESIVO®

Descripción del Producto:

Es un removedor de adhesivo a base de silicona para remover insumos médicos en la piel, de una manera rápida e indolora para el paciente, utilizado para el cuidado del estoma y para la retirada de cualquier insumo médico adherido en la piel.

Indicación: Utilizar para el cuidado del estoma, para remover las placas de los estomas y para la retirada de cualquier insumo médico adherido en la piel, como adhesivo de las cintas adhesivas o de apósitos adheridos en la piel.

Frecuencia de Uso: Las veces necesarias para remover el adhesivo



Código	Descripción	Unidad de empaque
1005-1	B Braun® Adhesive Remover 50ML Aerosol G	Caja x 24 unidades



www.bbraun.cl+56 224407100bbraun-chile@bbraun.com

15

CONCEPTO INTEGRAL EN HIGIENE DE MANOS

CONCEPTO DE HIGIENE DE MANOS BBRAUN

La Higiene de Manos es la estrategia más simple, económica y efectiva para prevenir las IAAS. Una simple acción y centrado en el paciente y en los profesionales de Salud.

infoiaas.cl@bbraun.com



Código	Descripción	Unidad de empaque
19840	TRIXOLIND BOTTLE (DP) "LATAM" 500ML	Caja x 20
19830	SOFTASKIN BOTTLE (DP) "LATAM" 500ML	Caja x 20
19831	SOFTASKIN BOTTLE (DP) "LATAM" 1000ML	Caja x 20
180021	SOFTALIND VR BOTTLE CL 100ML	Caja x 20
19890	SOFTALIND VR 500ML-ALCOHOL GEL	Caja x 20
19891	SOFTALIND VIS-R. BOTT.(DP) "CL" 1000ML	Caja x 20
19582	MELISEPTOL Wipes Sensitive	Caja x 12
19796	MELISEPTOL FOAM PURE SPRAY 750 ML.	Caja x 12

CMERCCIA

TU DÍA A DÍA NOS IMPORTA

> PRODUCTOS CLÍNICOS

PORQUE QUEREMOS CUIDARTE





SANTIAGO

Encuentra y compra todos nuestros productos en:



www.comerccia.cl



eespinoza@inheridas.cl



(+56) 9 62371031



Avda. Salvador 737 Providencia

Despacho a todo Chile



SISTEMAS DE DESCARGA

FIELTRO DE DESCARGA CLÍNICO



Descripción del Producto:

Fieltro es una malla compuesta por 50% algodón de baja densidad y 50% tela acrílica con adhesivo hipoalergénico, adaptable a la lesión, compatible con todo tipo de apósitos y otros tratamientos de descargas.

No se debe mojar. Cortar con tijeras de yeso. Realizar el corte a 0.5 a 1 cm de la lesión. No utilizar en pacientes isquémicos, infección o edema.

Indicación: Úlceras de pie diabético neuropática y neuro-isquémica; o cualquier tipo de patología que necesite descarga.

Frecuencia de Uso: 48-72 horas

ID Comerccia	Tamaño cm	Espesor mm
FLT610	10 x 10	6
FLT650	10 x 50	6
FLT6300	10 x 300	6
FLT810	10 x 10	8
FLT850	10 x 50	8
FLT8200	10 x 200	8



www.comerccia.clQ (+56) 9 62371031✓ eespinoza@inheridas.cl

4

SISTEMA COMPRESIVO, ALTA COMPRESIÓN

MEDIVEN PLUS ÚLCER KIT CALCETA COMPRESIVA DE TRATAMIENTO

Descripción del Producto: Kit de 3 calcetas compresivas,

compuestas por 70-80% de poliamida y 20-30% elastano, 2 de ellas trae 1% de plata elemental, una para que la persona permanezca las 24 horas con ella y la otra para cambiarla en el momento de la curación. Cada calceta entrega 20mmHg. Revisar si el calcetín ajusta bien y no se han formado pliegues. Lavar con agua tibia y jabón neutro. Secar a la sombra. La calceta no debe entrar en contacto con la úlcera venosa. Utilizar calzador.

Indicación: Ulceras Venosas Tipo II, III y IV.

Frecuencia de Uso: Su cambio se realizará en cada curación. Durante el día se utiliza una calceta de cada tipo, obteniendo una compresión total de 40mmHg y en la noche se deja solo la que está en contacto con la piel.

Duración: 6 meses



ID Comerccia	Talla	Cms. de Tobillo
MDV2	2	20-22
MDV3	3	22-24
MDV4	4	24-26
MDV5	5	26-28
MDV6	6	28-30
MDV7	7	30-32



C MERCCIA

SISTEMA COMPRESIVO, BAJA COMPRESIÓN

MAXIS RELAX, MAXI MICRO CALCETAS COMPRESIVAS DE PREVENCIÓN

Descripción del Producto: Calceta compresiva compuesta por 70-80% de poliamida y 20-30% elastano. Maxi Micro entrega una compresión 20-22 mmHg y Maxi Relax de 15-20 mmHg; existen calcetas para mujer y calcetín para varón.

Revisar si el calcetín ajusta bien y no se han formado pliegues. Lavar con agua tibia y jabón neutro. Secar a la sombra.





15-20 mmHg: Prevención edema ocupacional, viajes prolongados.

20-22 mmHg: Prevención de residivas de úlcera venosa, pacientes con úlcera venosa mixta, várices sintomáticas.

Frecuencia de Uso: Durante el día.

Duración: 6 meses

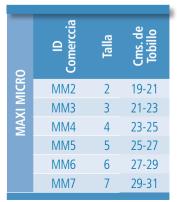

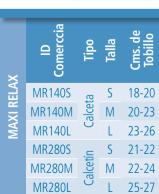





CALZADOR

CALZADOR PARA CALCETAS COMPRESIVAS

Descripción del Producto: El calzador para calcetas compresivas es una herramienta muy eficaz y duradera para simplificar la rutina de instalar las medias de compresión.

Fabricado en tubo de acero, con una forma y longitud que permite la colocación de las medias y calcetas compresivas más fácilmente. Ancho de la base: 25 cm. Altura total: 32 cm

Indicación: Personas con poca movilidad y que necesitan ayuda para la instalación de su calceta o calcetín.

Duración: Más de 2 años

ID Comerccia	Talla
MB1	Talla única









soluciones de alta tecnología y efectividad para el tratamiento avanzado de heridas, las que ponemos al alcance de los y las profesionales de la salud y sus instituciones. Gracias al uso de los productos de nuestro portafolio podrán lograr menores tiempos de recuperación para sus pacientes, mejorando antes y de mejor manera, su calidad de vida.



Contacto **Ventas**

2

Covalon y Genadyne grandes tecnologías para curación avanzada al alcance de todos.

Contacto Ventas: +56 (2) 2401-900



ventas@promedon.com

Región	Representante de Ventas	
Santiago y Norte	Carmen Rivera	(+569) 799 95883
	carmen.rivera@promedon.com	
Santiago y V Región	Carla Faúndez	(+569) 756 98531
Region	carla.faundez@promedon.com	
Centro Sur	Natalia Castro	(+569) 876 87605
	natalia.castro@promedon.com	
Sur	Ana Monsalves	(+569) 787 71549
	ana.monsalves@promedon.com	



REGENERADOR, INHIBIDOR DE LAS METALOPROTEASAS

COLACTIVE PLUS

Descripción del Producto: Apósito de colágeno parcialmente desnaturalizado que forma una matriz que promueve el crecimiento celular junto con la acción de EDTA que actúa sobre el Zinc y asi inhibir las metaloproteasas. Además, mantiene el ambiente húmedo por la acción de CMC, alginato. Se puede recortar, se adapta a la lesión, se reabsorbe.

Indicación: Pacientes con úlceras crónicas, estancadas, con colonización baja.

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días o lo que indique protocolo de su institución y requiere un apósito secundario.



Producto	Medidas	ID Convenio. Marco
Colactive Plus	5 x 5 cms	1830442
Colactive Plus	10 x 10 cms	1822830



www.promedon.com +56 (2) 2401-900 wentas@promedon.com

4

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA

COVAWOUND

Descripción del Producto: Apósito de espuma hidrofílica pentalaminar de suave adherencia de silicona que cuida la piel circundante y capas altamente absorbente: capa de contacto de silicona que no se adhiere a la superficie de la herida, centro de espuma de poliuretano, una capa no tejida y otra de fibras absorbente, más una capa exterior de poliuretano semipermeable que traspasa el vapor de agua, pero que actúa de barrera a microorganismos y otros líquidos.

Indicación: Para prevención de LPP y Heridas con exudado moderado o abundante y heridas con colonización baja.

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días o lo que indique protocolo de su institución.



Producto	Medidas	ID Convenio. Marco
Covawound Espuma Silicona Sin Borde	5 x 5 cms	1556975
Covawound Espuma Silicona Sin Borde	10 x 10 cms	1828755
Covawound Espuma Silicona Con Borde Lite	10 x 10 cms	1538026
Covawound Espuma Silicona Con Borde	10 x 10 cms	1828754
Covawound Espuma Silicona Talonera	20 x 26 cms	1704858
Covawound Espuma Silicona Sacro	15 x 17 cms	1822831
Covawound Espuma Heel Talonera	10 x 13 cms	1695228



HIDRATANTE, TUL DE SILICONA

GENTILTAC

Descripción del Producto: Lámina de contacto estéril con una capa superior impermeable de poliuretano y una capa de gel de silicona transparente con orificios de 2 mm que favorece el traspaso del exudado, mínimo riesgo de maceración, otorgando protección manteniendo intacto el lecho de la herida, se ajusta a los contornos, es flexible. No deja residuos, es recortable y de retiro atraumático.

Indicación: Todo tipo de heridas o úlceras y abrasiones con colonización baja y exudado escaso.

Frecuencia de cambio: Puede permanecer hasta 7 días o según protocolo de su institución.



Producto	Medidas	ID Convenio. Marco
Covawound Espuma Silicona Sin Borde	5 x 5 cms	1556975
Covawound Espuma Silicona Sin Borde	10 x 10 cms	1538024

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

GENADYNE

Descripción del Producto: La TPN de Genadyne utiliza una bomba o equipo XLR8+ con un sistema único de variable ondulante para extracción de exudado. Cada kit de curación compuesto por: una espuma la cual otorga un mejor control sobre el exudado de la herida, 1 port de 5 cm, un film protector del port, una manguera de silicona de 80 cm, dos film. Las medidas dependerá del tamaño de cada kit, S,M,L. También existe la versión de espumas con plata iónica y espuma blanca PVA (para cubrir huesos y tendones). Cumple FDA-ISO Canister se adquiere por separado.

Indicación: Este dispositivo se coloca según indicación medica y/o enfermera, está indicado especialmente para pacientes con heridas muy exudativas de alta complejidad, colonizadas o infectadas.

Frecuencia de Cambio: Se recomienda su cambio cada 48 horas o según protocolo de su institución.



Producto	Medidas	ID Conv. Marco
Kit Espuma S	Small	1549559
Kit Espuma M	Medium	1549562
Kit Espuma L	Large	1549533
Kit Espuma Plata S	Small	1549561
Kit Espuma Plata M	Medium	1549554
Kit Espuma Plata L	Large	1553194
Kit Espuma PVA	Large	1823470
Equipo XLR8 - Ho	spitalario	Como- dato
Equipo UNO - Do	miciliario	Venta Directa
Canister 200 cc.	200 cc.	1537411
Canister 400 cc.	400 cc.	1534630
Canister 600 cc.	600 cc.	1535776
Canister 800 cc.	800 cc.	1535770
Canister 1.100 cc.	1.100 cc.	1535753



Grupochic S.A.

Grupochic es una empresa chilena, especialista en compresión graduada, que cuenta con la representación exclusiva de lbici desde hace 36 años y es dueña de la marca Varimed, ambas líneas son fabricadas en Italia como dispositivos médicos y cuentan con una serie de certificaciones que avalan su calidad y uso.

Certificaciones



CE: productos certificados como dispositivos médicos.



Certificación internacional Oeko-Tex ® Standard 100: Ausencia de sustancias nocivas al contacto con la piel.



Norma ISO 9001 - 2015: Regla que estandariza el sistema de control de calidad de las organizaciones.



Sistemas de gestión de calidad de la industria de dispositivos médicos: Norma reconocida a nivel mundial destinada a ser utilizada por todas las organizaciones que se encarguen del diseño, desarrollo, producción, instalación y asistencia técnica de los productos médicos o de los servicios relacionados.





SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN DE ALTA COMPRESIÓN

KIT DE HERIDAS CON CIERRE DOBLE CAPA

Descripción del Producto: Sistema compresivo elástico que entrega 30/40 mmHg. a nivel del maléolo. El Kit trae 3 medias y un calzador de seda; dos medias de color blanco, compuestas cada una de ella con 82% de poliamida y 18% de elastano, con punta abierta y entrega una compresión de 18/24 mmHg. para que la persona permanezca las 24 horas con ella y la otra para cambiarla en el momento de la curación. La segunda media, con cierre, que se aplica sobre la anterior, compuesta por un 89% de poliamida, 10% de hilo caucho y 1% elastano, trae punta abierta y entrega una compresión de 15/20 mmHg.

Indicación: Úlceras venosas Tipo 3 y 4 principalmente.

Frecuencia de Uso: Para el día se recomienda la utilización de las dos medias durante el período de movilidad. Durante la noche, en la fase de inmovilidad, se retira la segunda media, quedando una compresión de 18/24 mm Hg.



CM	Tallas	1-XS	2-S	3-M	4-L	5-XL
	Circunferencia sobre tobillo (cm)	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34
1648	Circinferencia bajo rodilla (cm)	24-28	28-32	32-36	36-40	40-44





SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN DE ALTA COMPRESIÓN

KIT DE HERIDAS SIN CIERRE DOBLE CAPA

Descripción del Producto: Sistema compresivo elástico que entrega 30/40mmHg. a nivel del maléolo. El Kit trae 3 medias y un calzador de seda; dos medias de color blanco, compuestas cada una de ella con 82% de poliamida y 18% de elastano, con punta abierta y entrega una compresión de 18/24 mmHg. para que la persona permanezca las 24 horas con ella y la otra para cambiarla en el momento de la curación. La segunda media, sin cierre, que se aplica sobre la anterior, compuesta por un 77% de poliamida y 23% elastano, trae punta abierta y entrega una compresión de 15/20 mmHg.

Indicación: Úlceras venosas Tipo 3 y 4 principalmente.

Frecuencia de Uso: Para el día se recomienda la utilización de las dos medias durante el período de movilidad. Durante la noche, en la fase de inmovilidad, se retira la segunda media, quedando una compresión de 18/24 mmHg.



CM	Tallas	1-XS	2-S	3-M	4-L	5-XL
337	Circunferencia sobre tobillo (cm)	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34
1648	Circinferencia bajo rodilla (cm)	24-28	28-32	32-36	36-40	40-44



www.varimed.cl+56 22 2370159contacto@grupochic.cl

4

SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN DE ALTA COMPRESIÓN

CALCETÍN UNA CAPA DE COMPRESIÓN GRADUADA

Descripción del Producto: Sistema elástico, el set trae 2 medias de color café, cada una esta compuesta de 78% de poliéster y 22% de elastano, con punta abierta, trae calzador de seda. Entrega una compresión en el tobillo de 30 a 40 mmHg.

Indicación: Úlcera venosa Tipo 2 y 3. También en tratamiento de Trombosis Venosa Profunda (TVP) y en pacientes para prevenir las recidivas de las úlceras venosas secundarias. Para el personal de salud que trabaja en el área crítica y presenta várices.

Frecuencia de Uso: Para el día se recomienda la utilización de cada media en cada pierna durante el período de movilidad. Durante la noche, en la fase de inmovilidad, se retiran las 2 medias.





CM	Tallas	2-S	3-M	4-L	5-XL	6-XXL
	Circunferencia sobre tobillo (cm)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
1642	Circinferencia bajo rodilla (cm)	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42



SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN DE BAJA COMPRESIÓN

CALCETÍN PRIMERA CAPA COMPRESIÓN GRADUADA

Descripción del Producto: Sistema compresivo elástico, el set trae 2 medias, cada una esta compuesta de 75% de poliamida y 25% de elastano, con punta abierta, trae calzador de seda. Entrega una compresión en el tobillo de 18 a 24 mmHg.

Indicación: Úlceras venosas Tipo 1 a 4 mixtas y en pacientes para prevenir las recidivas de las úlceras venosas secundarias. Para el personal de salud que trabaja en el área crítica sin várices o en área no crítica con várices.

Frecuencia de uso: Para el día se recomienda la utilización de cada media en cada pierna durante el período de movilidad. Durante la noche, en la fase de inmovilidad, se retiran las 2 medias, siempre que no presente úlcera venosa, en este caso se deben mantener por 24 horas.





СМ	Tallas	1-XS	2-S	3-M	4-L	5-XL
3371	Circunferencia sobre tobillo (cm) Circinferencia bajo	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34
1648	Circinferencia bajo rodilla (cm)	24-28	28-32	32-36	36-40	40-44

GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS

1





A partir del año 2017 se desarrolla el área de Abatex a través de tejidos técnicos aprovechando el conocimiento textil y la continua preocupación por desarrollar nuevos productos para el mercado. Buscar la excelencia en sus procesos y productos, aprovechando la experiencia y conocimiento en la fibra de acetato Naia y la tecnología de cobre antimicrobiana desarrollada en Chile. En el año 2020 debido a la pandemia, el desarrollo de nuevos producto se acelera, ingresando al área de ropa medica e insumos para heridas.

Contacto Ventas













SUCURSAL

Cobertura a lo largo de todo Chile



Avenida del Valle Sur N°576 Oficina N°305

Ciudad Empresarial Huechuraba. Santiago Chile

Contacto:



(+56 2) 2307 8809 (+56 2) 2307 8999



contacto@renhetchile.cl



www.renhetchile.

RRSS:



Renhet Chile



@renhetchile



Renhet Chile





CINTA DE SEDA

CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA

Descripción del Producto: Cintas adhesivas by Abatex con una excelente fijación y compuestas de tela a base de 100% acetato con tecnología de cobre, creando una barrera biocida de tecnología certificada que mantiene un 99.9% de efectividad incluso después de +50 lavados. *ISO 20743, ISO 13485:2016 y ISO 6330 *ASTM E2149-13.

Cubiertas con adhesivo hipoalergénico de acrilato, ideal para la piel sensible. Está fabricado utilizando hilado sustentable y biodegradable NAIATM.

No causa dolor ni irritación al ser removida. Tamaños disponibles 2,5cm x 8m y 5cm x 8m.

La piel debe estar limpia y seca antes de aplicar la cinta. En caso de irritación, descontinuar su uso.

Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Indicación: Para fijar grandes pesos de apósitos; para fijar las Botas de Unna; fijar apósitos en pieles sudorosas, con edema y frágiles, puntos de apoyo y articulaciones. Fijación de sondas foley, sondas nasogastricas, sondas T, cateteres, electródos, drenajes.

Frecuencia de Cambio: Su cambio dependerá del objetivo de aplicación, pero puede durar hasta 10 días en la piel, sin perder su efecto de fijación.







Id	Descripción	Medidas	Empaque
1703713	Cinta Adhesiva Médica	2.5 cm x 8 m	6 unidades Renhet
1703712	Renhet Abatex	5 cm x 8 m	3 unidades Renhet

Evaluación de Actividades Antibacterianas

Muestras	Descripción		Concer	ntración			
Macsuas	Descripcion	8	8 hrs		8 hrs 24		hrs
Microorganismo inoculado	Concentración Suspensión Bacteriana	Enumeración obtenida en la muestra	% Eficacia	Enumeración obtenida en la muestra	% Eficacia		
Escherichia coli ATCC 8739	1,7x106 ⁶ ufc/mL	0 ufc/mL	100%	0 ufc/mL	100%		
Staphylococcus aureus ATCC 25923	7,2x10 ⁵ ufc/mL	2,3 x 10 ² ufc/ mL	99,96805%	0 ufc/mL	100%		



VALIDE7

24 meses a partir de la fecha de fabricación.











GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS





Cardinal Health™ ofrece una cartera completa de productos para el manejo avanzado y tradicional de heridas, cuidado de la incontinencia, manejo de la piel y presión negativa. Creemos que la salud de la piel es una misión crítica, estamos aquí con productos y educación para apoyarlos en el cuidado de sus pacientes.



GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS

2





www.hospitalia.cl



+56 22 2570 6100



ventas@hospitalia.cl



Américo Vespucio 1565 Quilicura, Santiago, Chile

Región	Representante de Ventas	Q	lacksquare
	Bárbara Cid	569 34456814	bcid@hospitalia.cl
RM	Crismely Cortéz	569 42650541	ccortez@hospitalia.cl
KIVI	Pablo Zoppi	569 33893265	pzoppi@hospitalia.cl
	Julio Montecinos	569 34456815	jmontecinos@hospitalia.cl
Norte	Anna Gromova	569 97012304	agromova@hospitalia.cl
IV, V	Marcela Torres	569 42650544	mtorres@hospitalia.cl
VI,VII	Camila Molina	569 95544475	cmolina@hospitalia.cl
VIII-IX	Armando Hartwig	569 97012265	ahartwig@hospitalia.cl
Sur	Nicol Araneda	569 50036630	naraneda@hospitalia.cl





BACTERIOSTÁTICO, ESPUMA HIDROFÍLICA DE PHMB

KENDALLTM AMD

Descripción del Producto:

Espuma de poliuretano impregnada en antimicrobiano de PoliHexaMetileno Biguanida(PHMB) al 0.5%, no se adhiere al lecho de la herida. La espuma AMD absorbe el fluido y las bacterias de la herida, el PHMB de la espuma se activa e inhibe las bacterias absorbidas en su interior. Se puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización crítica con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días según nivel de exudado y protocolo institucional.



ld CM	Código		Descripción / Medidas	Empaque
1595581	55522AMDX		2" x 2" (5 X 5 cm)	Caja X 100 uds
	55535AMDX	Espuma	3.5" x 3" (9X 7.6 cm)	Caja x 50 uds
1588848	55544AMDX	e Esp	4" x 4" (10 X 10 cm)	Caja X 50 uds
1650138	55548AMDX	Apósito de F	4" x 8" (10 X 20 cm)	Caja X 50 uds
1646461	55566AMDX	Após	6" x 6" (15 X 15 cm)	Caja X 50 uds
	55544PAMDX		4 x 4 (10 X 10 cm) con Topsheet	Caja X 50 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085 Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906



ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA

ESPUMA KENDALLTM

Descripción del Producto: Espuma hidrofílica de poliuretano, ultrasuave que protege y amortigua las heridas. Fomenta granulación y epitelización. Permeable a gases, alta capacidad absorción. Estéril, hipoalergénico. Existen diferentes presentaciones.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. Para prevenir zonas de apoyo.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días según nivel de exudado y protocolo institucional. Para prevención de las LPP/UPP cambios cada 7 días.



Id CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1673609	55533	Espuma Hidrofílica 7.5 x 7.5 cm	Caja x 10 uds
1623886	55535	Espuma Hidrofílica Fenestrada 8.9 x 7.6 cm	Caja x 10 uds
	55535P	Espuma Fenestrada con Poliuretano 8.9x7.6 cm	Caja x 50 uds
1338491	55544	Espuma Hidrofílica 10x10 cm	Caja x 10 uds
	55544B	Espuma Hidrofílica Island 10 x 10 Espuma - 5X5 CM	Caja x 10 uds
1822633	55548	Espuma Hidrofílica10x20 cm	Caja x 10 uds



BACTERICIDA, ALGINATO CON PLATA IÓNICA

REINFORCED GELLING FIBER + AG

Descripción del Producto: Es una almohadilla no tejida, estéril y reforzada, compuesta por alginato de calcio con un alto contenido en ácido gulurónico, carboximetilcelulosa (CMC) y plata iónica.

Los iones de plata se liberan desde el apósito (fosfato de sodio y plata), en presencia de exudado desde la herida. A medida que el

apósito absorbe exudado, el alginato forma un gel, que ayuda a mantener un ambiente húmedo para la cicatrización óptima de la herida. Se puede recortar. Aplicar solo en la herida.

Indicación: En heridas y úlceras infectadas con exudado moderado a abundante.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas



Id CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1646462	RGFB45AG	Reinforced Gelling Fiber + Ag 10 x 12 cm	Caja x 10 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085 Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906





BACTERIOSTÁTICO, GASA NO TEJIDA CON PHMB

EXCILON™ AMD

Descripción del Producto: Es un apósito fenestrado, fabricado de Polyester y Rayón (gasa no tejida) Impregnado con PoliHexaMetileno de Biguanida (PHMB) al 0.2%. Inhibe las bacterias en el apósito. Actúa sobre microorganismos Gram-, Gram+, Hongos/Levaduras. Incluidos MRSA y VRE. Presentación estéril, libre de látex, hipoalergénico. Se puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización crítica con exudado escaso. También útil en fijadores externos; catéteres centrales, accesos de hemodiálisis, estomas, traqueostomías, gastrostomías, tubos de alimentación.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días o según protocolo institucional y nivel de exudado del paciente.



Id CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1647174	7088	Gasa Excilon AMD 10 x 10 cm 2 uds x sobre	Cartón x 600 uds
1623888	7089	Gasa Excilon AMD Vía Venosa 5 x 5 cm 2 uds x sobre	Cartón x 1400 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085 Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Maryin Griffin Rd. AUGUSTA. GA USA 30906





BACTERIOSTÁTICO, GASA TEJIDA CON PHMB

KERLIX AMD

Descripción del Producto: Es un apósito en presentación de rollo, elaborado de gasa 100% algodón, con 6 capas de tejido prensado. No genera hilachas. Impregnado en PHMB Polihexametileno Biguanida al 0,2% con amplio espectro antibacteriano; MRSA, VRE, G, (+), G (-), hongos y levaduras. Inhibe la carga bacteriana en el apósito. En presentación estéril, hipoalergénico. Se puede cortar.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización crítica con exudado abundante.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días según nivel de exudado y protocolo institucional.



ld CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1647426	3331	Kerlix en Rollo 11.4 cm x 3.7 mts	Cartón x 60 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085 Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906

HIDRATANTE, TULL CON PETROLATO

XEROFORM

Descripción del Producto: Es una gasa tejida impregnada en petrolato y ungüento hidrofílico de Tribromofenato de Bismuto al 3%. Mantiene un ambiente húmedo óptimo en la cicatrización de las heridas y epidermis. No se adhiere al lecho de la herida haciendo más fácil el retiro. Se adapta a cualquier superficie.

Indicación: En heridas o úlceras epitelizadas o como apósito secundario para aumentar el efecto bacteriostático del apósito primario.

Frecuencia de Cambio: Cada 4 días en epitelización y como apósito secundario, según recomendaciones del apósito primario



ld CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
	8884433605	XEROFORM 12 cm x 22 cm (5" x 9")	Caja x 50 uds
	8884431605	XEROFORM 2,5 cm x 20 cm (1" x 8")	Caja x 50 uds
	8884433500	XEROFORM 10 cm x 10 cm (4" x 4")	Caja x 25 uds
	888443200	XEROFORM 10.2cmx2.7mt (4" x 9")	Caja x 6 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085 Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd. AUGUSTA, GA USA 30906





BACTERIOSTÁTICO, ABSORBENTE MIXTO

TELFA AMD

Descripción del Producto: Apósito post-quirúrgico con pad absorbente central de poliéster denso no tejido con una base de algodón impregnado con antimicrobiano de Polihexametileno Biguanida al 0,2%, amplio espectro antibacteriano; MRSA, VRE, G, (+), G (-), hongos y levaduras. La película protectora central antiadherente fija al pad central (myllar) protege la cicatriz y no se adhiere a la sutura, en el Interior la capa es de algodón, que ofrece una absorción moderada para el control de humedad de la herida.

Indicación: Con exudado bajo a moderado en cobertura de incisiones quirúrgicas, cobertura de laceraciones y abrasiones, zonas donantes, herida incisional lineal bajo drenaje.

Frecuencia de Cambio: cada 5 días o según protocolo institucional



ld CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1640822	7662	Telfa AMD 7.5x10 cm Estéril	Caja x 50 uds
1623885	7663	Telfa AMD 7.5 x20 cm Estéril	Caja x 50 uds
	7665	Telfa AMD Island 10x12 cm Estéril	Caja x 25 uds
	7666	Telfa AMD Island 10 x20 cm Estéril	Caja x 25 uds
	7667	Telfa AMD 10x25 cm Estéril	Caja x 25 uds
	7668	Telfa AMD 10x35 cm Estéril	Caja x 25 uds

Fabricante Legal: Cardinal Health 200 LLC, 3651 Birchwood Drive Waukegan, IL USA 60085 Sitio de Manufactura: Covidien 1430 Marvin Griffin Rd, AUGUSTA, GA USA 30906

HIDRATANTE, POLIÉSTER

TELFA CLEAR

Descripción del Producto: Es un apósito fabricado de poliéster microperforado, transparente no adhesivo, poroso, hipoalergénico que favorece el proceso de cicatrización. No produce dolor al retirarlo. Permite visualizar la herida a través de él. Presentación en lámina y rollo. Se puede recortar.

Indicación: En heridas o úlceras, quemaduras con colonización baja y exudado escaso. También se utiliza como apósito secundario, para proteger los apósitos primarios como hidrogeles o colágenos.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días como apósito primario, como apósito secundario, según características del apósito primario.



Id CM	Código	Descripción / Medidas	Empaque
1662005	1111	Telfa Clear 10,2 x 12,7 cm	50 ea/case
1659691	1113	Telfa Clear 30,5 x 30,5 cm	50 ea/case
1659690	1114	Telfa Clear 30,5 x 61 cm	50 ea/case
1653912	1115	Telfa Clear en rollo 97.5cm x 22.75m	4 ea/case

GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS



ESSITY Medical Solutions



multinacional del área de la salud, con base en Europa y líder en el Cuidado de Heridas, Terapia Compresiva y Ortopedia a nivel mundial.

Ofrecemos soluciones terapéuticas integrales para apoyar a sus pacientes en todas las etapas del tratamiento.



Contacto Ventas

2



Región / Comuna	Representante de Ventas	Q	
SANTIAGO			
San Miguel	ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS	(2) 25220528	hbh_cris2006@hotmal.com
Vitacura	CASA DEL ENFERMO	(2) 23650798	jivo@vtr.net
Providencia	CASA DEL ENFERMO	(2) 22324396	accemedltda@adsl.tie.cl
Vitacura	CATERINA	(2) 22186593	ventas@caterina.cl
	VITAL SALUD	(2) 26979370	vitalsalud690@gmail.com
	ORTOPEDIA SUIZA	(2) 22830644	jefaptealtoortopediasuiza@gmail.com
Puente Alto	ORTOPEDIA SUIZA	(2) 28532867	jefanunoaortopediasuiza@gmail.com
Ñuñoa	ORTOPEDIA SUIZA	(2) 22693350	jefaquilinortopediasuiza@gmail.com
Peñalolén	ORTOPEDIA SUIZA	(2) 29470098	jefaquilinortopediasuiza@gmail.com
Santiago	Botiquines a Domicilio	(2) 2556 6066	claudio@geerdink.cl
	Stomabags	(2) 3210 4311	www.stomabags.cl / www.wholesurgical.cl
REGIONES			
Arica	Centro Ortopedico Astor	(58) 2251417	Jacqueline.lazo@hotmail.com
Iquique	FARMACIAS ARAUCO	(9) 98494912	fdo.ale.h@hotmail.com
Calama	Ortopedia El Loa	(55) 2311946	ortopediaelloa@hotmail.com
Copiapó	NAT Ortopedia	(52) 2239768	natortopedia@gmail.com
Curicó	Fabrica y Comercializadora Ortopedia Alemana	(75) 2326854	-
	Sociedad Comercial Collmens	(75) 2746090	collmens@gmail.com
Talca	Coldiab	(9) 40180865 (71) 2310716	ventas@coldiab.cl
	Ortopedia Montecinos	(9) 77722845	ortopediamontecinos@gmail.com
Linares	Puntomed	(9) 94998579 ó (73) 2212610	contacto@gmail.com
Temuco Villarriica	PHARMEDIC LTDA.	(45) 2271863 (45) 2416756	gerencia@pharmedic.cl
Temuco	ORTHOSALUD	(45) 2230222	gerencia@orthosalud.cl
Valdivia	COMERCIAL MEJOR VIDA LTDA.	(63) 2207246	mejor.vidaltda@gmail.com
	VALDIVIA'S SCRUBS	(9) 54161198	natalia_amade@hotmail.com
	Valdmed Itda	(9) 68402831 ó (63) 2244192	ventas@valdmed.cl
La Union	MEDICAL'S	(9) 95552043	medicalsester@gmail.com
	SARA CONTRERAS	(9) 93332537	sary_scl@hotmail.com
Puerto Montt	TOPMEDICAL	(65) 2347389	ventas@topmedical.cl
Ancud	VIMED SPA	(9) 95731852	vimedspa@gmail.com
Castro	Insumos Chiloé	(9) 88188625	insumoschiloe@gmail.com
Punta Arenas	Ortho Med Ltda	(61) 2237070	ventas@orthomed.cl





BACTERIOSTÁTICO, ESPUMA DE DACC

CUTIMED® SILTEC® SORBACT

Descripción del Producto: Espuma de poliuretano con tiras superabsorbentes con cubierta de DACC (dialquilcarbamoilo), que atrapa las bacterias en su superficie y absorbe exudado. Control pasivo de la carga biológica. Eficacia comprobada, reducción de carga microbiana en heridas con colonización crítica en un 73% en 4 días. Libre de sustancias químicas, fármacos y látex. Vigencia 3 años. No usar con ungüentos o pomadas grasas que interfieren con la interacción hidrófoba antimicrobiana del apósito. Puede cortarse, preferible en los bordes de silicona. Cubrir la herida dejando por lo menos 2 cm de distancia perilesional.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización crítica con exudado de moderado a abundante

Frecuencia de Cambio: Curación cada 3-4 días o según saturación de exudado.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
73251-00001	1654004	12.5cm x 12.5cm	Caja x 10
73251-00000	1654005	7.5cm x 7.5cm	Caja x 10



BACTERIOSTÁTICO, HIDROPOLIMERO DE DACC

CUTIMED® SORBACT® HYDROACTIVE

Descripción del Producto: Apósito de matriz de hidropolimero (hidrogel) con DACC(dialquilcarbamoilo) de acción hidrófoba antimicrobiana, libre de sustancias químicas, fármacos y látex. Vigencia 3 años. Puede ser usado bajo terapia compresiva. Aplicar el lado verde monocolor (sin impresión) sobre la herida. No debe cortarse, no superponer 2 o más apósitos. No usar con ungüentos, pomadas o tull que interfieran con la interacción hidrófoba antimicrobiana del apósito.

Indicaciones: Heridas o úlceras superficiales con tejido desvitalizado y exudado bajo a moderado con colonización crítica.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días.



	venta
72646-00003 1618708 7cm x 8.5cm	Caja x 10
72646-00004 1654003 14cm x 14cm	Caja x 10





PROTECTOR CUTÁNEO

CUTIMED® PROTECT

Descripción del Productos: Película protectora cutánea sin alcohol. Usada para proteger la piel, con secado rápido en 30 segundos. Mejora la adhesión de los adhesivos.

Indicaciones: En heridas o úlceras con pieles maceradas o eritematosas. También para evitar las dermatitis por los fluidos en la incontinencia urinaria y/o fecal, ostomías, adhesivos y sustancias irri-

tantes para la piel. Protección de la piel a la fricción y presión por inmovilización prolongada.

Frecuencia de Uso: Aplicar spray o aplicador cada 72 - 96 horas o mayor frecuencia según exposición a humedad.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
72653-00001		Spray de 28ml	Caja x 12
72652-00003		Pomo de 90gr	Caja x 12
72654-00001		Sachet de 1ml estéril	Caja x 25





HIDRATANTE, ESPUMA DE UREA AL 10%

CUTIMED® ACUTE

Descripción del Producto: Lubricante cutáneo, espuma hidratante de urea al 10%, para hidratar piel sana seca o extraseca. Fortalece el equilibrio hídrico de la piel. Sin olor y de rápida absorción.

Indicaciones: Para pieles pigmentadas, descamadas y sanas. Ideal para pacientes con pie diabético y para pacientes con insuficiencia venosa incluso con uso de medias de compresión.

Frecuencia de Uso: Aplicar 1 o 2 veces al día según necesidad.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
72641-00006		Envase de 125ml	Spray individual





ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA

CUTIMED® SILTEC

Descripción del Producto: Línea de apósitos de espuma hidrocelular de poliuretano con bandas termofusionadas superabsorbentes que retienen el exudado. La cara en contacto con la herida consta de una capa perforada siliconada, que permite una adherencia suave a la zona aledaña a la herida, sin generar adhesión en la herida ni la epidermis en proceso de regeneración. Adecuada para la liberación de presión en zonas de apoyo. Absorbe verticalmente los fluidos aún bajo compresión. Se puede recortar.

Indicaciones: En colonización baja con exudado moderado a abundante. Para la prevención de lesiones por presión en zonas de apoyo.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días en heridas o úlceras. En prevención sobre piel sana se puede mantener por 7 días.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
73285-00002	1600817	Siltec 10cm x 20cm	Caja x 10
73284-00001	1388973	Siltec B 12.5cm x 12.5cm	Caja x 10
73284-00004	1391727	Siltec B 22.5cm x 22.5cm	Caja x 5
73283-00001	1388974	Siltec L 10cm x 10cm	Caja x 10
73288-00001	1823246	Siltec plus 10cm x 10cm	Caja x 10
73285-00000	1363141	Siltec 5cm x 6cm	Caja x 5
73287-00000	1616446	Siltec Sacrum 17,5cm x 17,5cm	Caja x 5





HIDRATANTE, TULL DE SILICONA

CUTICELL® CONTACT

Descripción del Producto: Es una lámina de contacto de silicona microperforada, adecuada para todo tipo de heridas superficiales o en epitelización. Debe fijarse a la zona perilesional sana traspasando los bordes de la herida 2cm. En pieles maceradas, aplicar solo en la lesión.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado escaso. También se puede utilizar como apósito secundario cuando se necesita proteger un apósito primario, como hidrogel o colágenos.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días en colonización baja. En epitelización se puede cambiar a los 10 a 14 días. Como apósito secundario, según características del apósito primario.





Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
72680-00000	1589358	5cm x 7.5cm	Caja x 5 Apósitos
72680-00001	1391724	7.5cm x 10cm	Caja x 5 Apósitos
72680-00002	1823244	10cm x 18cm	Caja x 5 Apósitos
72680-00003	1823243	15cm x 25cm	Caja x 5 Apósitos





SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN COMPRESIVO

JOBST® ULTRASHEER

Descripción del Producto: Medias de compresión médica para mujer, fabricada por hilos de microfibras, transparente y transpirable. Proporciona un adecuado manejo de la humedad, frescura y suavidad en la piel. Disponible en las compresiones 15-20mmHg., 20-30mmHg., y 30-40mmHg., en la zona del tobillo. Existen medidas S-M y L.

Indicación: Para la prevención y el tratamiento de la enfermedad venosa crónicas desde piernas cansadas, telangectasias, várices, edema y cambios de coloración de la piel, hasta úlcera venosa cicatrizada.

Frecuencia de Uso: Durante el período de movilidad(día). Retirar en la noche.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
75201-00015	1589365	U.S./Compresión 20-30mmHg. Punt.Cerrada S Honey	Caja individual
75202-00015	1589364	U.S./Compresión 20-30mmHg. Punt.Cerrada M Honey	Caja individual
75203-00015	1589363	U.S./Compresión 20-30mmHg. Punt.Cerrada L Honey	Caja individual



SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN COMPRESIVO

JOBST® FORMEN

Descripción del Producto: Calcetín de compresión de vestir, creado específicamente para hombre. Posee tejido de microfibras que absorben la humedad, siendo respirable y confortable, no produce calor ni prurito. Tejido firme y amigable con la piel. Disponible en las compresiones 15-20mmHg., 20-30mmHg., y 30-40mmHg. Mejora la circulación sanguínea, evita el edema y favorece el alivio continuo

de las piernas cansadas y dolorosas. Son reutilizables.

Indicaciones: Para la prevención y tratamiento de la Insuficiencia venosa. Para le prevención de recidivas secundarias de las úlceras venosas

Frecuencia de Uso: Durante el período de movilidad(día). Retirar en la noche.



Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
77160-00031	1654002	F.M./Compresión 20-30mmHg Punt.Cerrada S Negro	Caja individual
77161-00030	1654029	F.M./Compresión 20-30mmHg Punt.Cerrada M Negro	Caja individual
77162-00031	1656301	F.M./Compresión 20-30mmHg Punt.Cerrada L Negro	Caja individual
77163-00030	1654030	F.M./Compresión 20-30mmHg Punt.Cerrada XL Negro	Caja individual





SISTEMA COMPRESIVO, CALCETÍN COMPRESIVO ALTA COMPRESIÓN

JOBST® ULCERCARE

Descripción del Producto: Calcetín compresivo doble capa con cierre para manejo de úlcera venosa activa. Provee compresión graduada de 40 mmHg. requerida para la cicatrización de úlceras venosas, distribuidas en 2 capas: interna blanca para su uso continuo 24 horas (2 en el kit para permitir su recambio) y externa beige con cierre para facilitar su aplicación para uso durante el día. Disponible en tallas S, M, L, XL y XXL. Permite mantener el calzado y ropa habitual. **Indicaciones:** En pacientes portador de insuficiencia venosa crónica con úlcera activa con indicación de alta compresión, sin presencia de edema

Frecuencia de Uso: La calceta blanca se utiliza durante las 24 horas y la beige durante el período de movilidad (día).

Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
73631-00011	1653998	S c/cierre DER	
73631-00012	1653999	M c/cierre DER	
73631-00013	1654036	L c/cierre DER	
73631-00014	1654000	XL c/cierre DER	<u>la</u>
73631-00015	1654001	XXL c/cierre DER	dividu
73631-00001	1653995	S c/cierre IZQ	Caja individua
73631-00002	1654039	M c/cierre IZQ	e e
73631-00003	1654038	L c/cierre IZQ	
73631-00004	1653996	XL c/cierre IZQ	
73631-00005	1823245	XXL c/cierre IZQ	





SISTEMA COMPRESIVO MULTICAPA, DOS CAPAS

JOBST® COMPRI2

Descripción del Producto: Sistema que combina los vendajes elásticos con los inelásticos. Ejerce una presión de 40 mmHg. en el maleolo, es desechable. Está compuesta por dos vendas, la primera es una venda de confort de almohadilla de poliuretano porosa que va en contacto con la piel del paciente. La segunda es una

venda de compresión cohesiva con indicadores que ayudan a aplicar la correcta compresión. se está ejerciendo una correcta compresión cuando estos indicadores de óvalos se convierten en círculos.

Indicaciones: En úlceras venosas Tipos 3 y 4, principalmente y para el manejo del edema y linfedema

Frecuencia de uso: Para uso continuo por 7 días o según frecuencia de cambio del apósito primario.





Código	ID CM	Medidas	Unidad de venta
76271-00000	1300151	18-25cm - Regular Compression (ITB>0,8)	Kit de 2 vendas
76271-00001		25-32cm - Regular Compression (ITB > 0,8)	Kit de 2 vendas

GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS

Ciencia. Aplicada a la Vida.™



3M contribuye a proteger y cuidar al paciente, proporcionando soluciones que ayudan a prevenir complicaciones y mejorar las experiencias clínicas y los resultados enfocados en el paciente.



Contacto Ventas

2

Ciencia. Aplicada a la Vida.™

DISTRIBUIDOR	Q	
CENCOMEX S.A		
	56974956370	cencomex@cencomex.cl
	56985965061	emachuca@cencomex.cl
COMERCIAL LIMA	AX SPA	
	56752222359	ventas@limax.cl
CIRUMED		
	5622220668	ventas@cirumed.cl
DROGUERIA HOF	MANN SAC	
	56997497202	atencionclientes@hofmann.cl
	56967790689	
CODIMED CHILE		
	56222315550	ventas@codimed.cl
	56223340761	
GBG- GERMÁN B	EHNKE	
	56222256210	ventas@gbg.cl
	56222256232	
NIPRO MEDICAL	CORPORATION	
	56977573487	patriciai@nipromed.com
	224987800	
SOCOFAR		
	56982491100	victor.arcos@socofar.com
	56984494673	victor.fuentes@socofar.com
	800530250	



PROTECTOR CUTÁNEO

3M™ CAVILON ™ PELÍCULA PROTECTORA

Descripción del Producto: Protector cutáneo transparente. Compuesto por polímeros de acrilato, solvente y plastificante. No se sale con los lavados, ni con la fricción. Libre de látex y alcohol, no arde, no tóxico ni citotóxico, compatible con Gluconato de Clorhexidina, hipoalergénico. Facilita la adhesión de los adhesivos. Aplicar a 10 o 15 cms. de distancia, dejar secar 30 seg. Máximo 2 puff en el mismo lugar.

Indicaciones: Protege la piel frente a lesiones asociadas a la humedad, tales como: lesiones periostomales, perilesionales, alrededor de tubos o drenajes, intertrigo y dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI). Adhesivos de uso sanitario (MARSI) y por fricción o roce; ayuda a disminuir el riesgo de lesiones por presión.

Frecuencia de Cambio: Según condición del paciente 72, 24 ó 12 horas.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
3346E	Cavilon Spray Pelicula Protectora Sin Ardor	28 ml	12 un / caja	
3343E	Cavilon Sachet Pelicula Protectora Sin Ardor	1 ml	25 un / caja	



HIDRATANTE- PROTECTOR CUTÁNEO

3M™ CAVILON™ CREMA DE BARRERA

Descripción del Producto: Crema protectora e hidratante-emoliente, respirable no oclusiva, bien esparcida permite observar la piel. Fórmula única: Dimeticona + aceite de coco + terpolímero de acrilato. Libre de látex, de alcohol y perfume, facilita la adherencia de los adhesivos, compatible con Gluconato de Clorhexidina. Hipoalergénico.

Indicaciones: Repone lípidos intercelulares mejorando la turgencia y resistencia de la piel, ideal para xerosis, piel perilesional de las úlceras venosas, pié diabético y puntos de apoyo. Prevención de DAI y DIP, resiste 3 lavados.

Frecuencia de Cambio: Hidratar el cuerpo o punto de apoyo cada 24 a 48 horas. En prevención de DAI o DIP cada 3 lavados



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
3392G	Crema Cavilon de Proteción Duradera	92 gr	12 un / caja	





ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON ADHESIVO

3MTM TEGADERMTM SILICONE FOAM

Descripción del Producto: Espuma hidrofílica con adhesivo de silicona multicapas (5 capas), con bordes finos. Disminuye fricción, controla exudado y microclima. Por la cara externa, indica nivel de saturación. El adhesivo de silicona, permite ver y evaluar la piel, es reposicionable y fácil de aplicar y remover.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante. Como prevención en puntos de apoyo.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días en heridas o úlceras y cada 7 días en prevención.



Código		Producto	Medidas	Empaque	ID CM
90631	Tegaderm™ Silicone Foam	Cuadrado sin borde	10 x 10 cm	40 un / caja	
90642	rm TM Si Foam	Cuadrado con borde	15 x 15 cm	40 un / caja	
90646	jade	Talón / Codo	15 x 15 cm	20 un / caja	
90648	Tec	Sacro	18.5 x 22 cm	20 un / caja	

ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO

3M™ TEGADERM™ FOAM

Descripción del Producto: Apósito de espuma absorbente no adherente de poliuretano moldeable y transpirable. Tetralaminar (4 capas) . Regula la evaporación de vapor de agua a través de la capa semipermeable. Libre de látex e hipoalergénico. Se puede cortar.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja y exudado moderado. También puede usarse alrededor de cánulas o tubuladuras.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
90601	Tegaderm Foam	10 cm x 10 cm	10 uds/Caja	1266156
90602	Tegaderm Foam	10 cm x 20 cm	5 uds/Caja	1266172





REGENERADOR, INHIBIDOR DE LAS METALOPROTEASAS

3MTM PROMOGRAN PRISMATM MATRIX

Descripción del Producto: Apósito primario liofilizado estéril compuesto por 55% de colágeno, 44% de celulosa oxidada regenerada (COR) maís plata al 1%. Modulador de Metaloproteasas y Elastasas. Favorece la formación de tejido de granulación, epitelización y la rápida cicatrización.

Indicaciones: Úlceras con colonización baja.

Frecuencia de Cambio: Cambio cada 72 horas y en heridas con exudado abundante cada 24 horas.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
KCI00000185	PS2028 PROMOGRAN Prisma	28cm² 10u/i 4i/b		1363192
KCl00000193	PS2123 PROMOGRAN Prisma	123cm² 10u/i 4i/b	40 apósitos / caja	-

REGENERADOR, COLÁGENO CON ALGINATO

3M™ FIBRACOL™ PLUS

Descripción del Producto: Apósito compuesto por un 90 % de colágeno y un 10 % de alginato de calcio. En presencia del fluido de la herida, mantiene un microambiente fisiológico húmedo en la superficie de la herida que es favorable para la formación de tejido de granulación y epitelización. Se recomienda retirar el remanente

de apósito que no se haya transformado en gel.

Indicaciones: Úlceras con colonización baja y exudado escaso moderado.

Frecuencia de Cambio: Cambiar cada 3 a 4 días.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
KCI00000144	2981 FIBRACOL+	5.1x5.1cm 12u/i 6i/b	72 apósitos / caja	1363145
KCI00000151	2982 FIBRACOL+	10.1x11.2cm 12u/i 6i/b	72 apósitos / caja	1363146
KCI00000169	2983 FIBRACOL+	10.2x22.2cm 6u/i 6i/b	36 apósitos / caja	-
KCI00000177	2984 FIBRACOL+	1x40cm 6u/i 6i/bx	36 apósitos / caja	-





HIDRATANTE, TULL DE SILICONA

3M™ ADAPTIC TOUCH™

Descripción del Producto: Es una capa de contacto flexible, de malla abierta de acetato de celulosa siliconada, diseñada para optimizar el tratamiento del fluido y minimizar el dolor al cambiar el apósito. El pequeño tamaño de los poros minimiza el riesgo de crecimiento interno del tejido de granulación. No se resbala. No deja

residuos. Si necesita cortarlo, hágalo con los 2 liner o láminas protectoras, será más fácil.

Indicaciones: Heridas o úlceras con colonización baja con exudado escaso.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días





Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
KCI00000110	TCH501 ADAPTIC TOUCH	5x7.6cm 10u/i 5i/b		1619281
KCI00000128	TCH502 ADAPTIC TOUCH	7.6x11.2cm 10u/i 5i/b	50	1619282
KCI00000136	TCH503 ADAPTIC TOUCH	12.7x15cm 10u/i 5i/b	apósitos / caja	-
70001419889	TCH504 ADAPTIC TOUCH	20x32cm 5u/i 5i/c		-

BACTERICIDA, ALGINATO CON PLATA IÓNICA

3M™ SILVERCEL™ NO ADHERENTE

Descripción del Producto: Apósito antimicrobiano de hidroalginato no adherente, compuesto carboximetilcelulosa y fibras con plata que absorbe exudado y mantiene un ambiente húmedo fisiológico para controlar microorganismos a nivel local. Puede cortarlo al tamaño de la herida o úlcera. Retire el apósito si el paciente

será sometido a una Resonancia Magnética.

Indicaciones: Heridas o úlceras con infección con exudado moderado a abundante

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
KCI00000045	CAD7050 SILVERCEL NA HA	5x5cm 10u/i 5i/bx	50	1363200
KCI00000052	CAD7011 SILVERCEL NA HA	11x11.2cm 10u/i 5i/b	apósitos / caja	1619295
KCI00000060	CAD7020 SILVERCEL NA HA	10x20cm 5u/i 5i/b	25 25	1363194-
KCI00000078	CAD7030 SILVERCEL NA HA	2.5x30.5cm 5u/i 6i/bx	apósitos / caja	-





BACTERICIDA, CARBÓN ACTIVADO CON PLATA METÁLICA

3MTM ACTISORBTM PLUS 25

Descripción del Producto: Apósito de carbón activado con plata metálica inserto en una funda no adherente. No se puede cortar. El carbón activado actúa como desodorante. Se puede doblar según necesidad.

Indicaciones: Heridas y úlceras con infección o carcinomas fungoides con exudado abundante.

Frecuencia de Cambio:

Cambios cada 24 a 48 horas.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
KCI00000011	MAP065 ACTISORB25	5.5x9.5cm 10u/i 5i/bx		1299465
KCI00000029	MAP105 ACTISORB25	10.5x10.5cm 10u/i 5i/bx	50 apósitos / caja	1299463
KCI00000037	MAP190 ACTISORB25	10.5x19cm 10u/i 5i/bx		1299464-





BACTERICIDA, ALGINATO CON PLATA IÓNICA

3M™ TEGADERM™ ALGINATO AG

Descripción del Producto: Apósito absorbente microbicida tópico de amplio espectro, compuesto de alginato de calcio de alta integridad, complejo de plata y carboximetilcelulosa, los iones de plata son liberados al contacto con el exudado de la herida de forma controlada. Flexible, adaptable, absorbe alta cantidad de exudado y

no deja residuos. Libre de látex. Se puede cortar.

Indicaciones: Heridas o úlceras con infección y exudado moderado a abundante. Se puede utilizar en cavidades.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
90301	Tegaderm Alginato Ag	5 cm x 5 cm	10 uds/Caja	
90303	Alginato Ag	10 cm x 12.7 cm	10 uds/Caja	



ABSORBENTE, ALGINATO DE CALCIO

3M™ TEGADERM™ ALGINATO

Descripción del Producto: Apósito absorbente hemostático suave, compuesto de alginato grado médico 100%. Absorbe exudado en cantidades abundantes, de rápida gelificación y no desintegración. Alta integridad. Libre látex, hipoalergénico. Se puede introducir en cavidades y/o bolsillos.Si el apósito parece estar seco, retírelo

humedeciendo con solución fisiológica estéril.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja y exudado moderado a abundante. Se puede utilizar en cavidades y en sangrados leves tipo napa por su efecto hemostático suave.

Frecuencia de Cambio: Cada

3 a 4 días.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
90112	Tegaderm Alginato	10 cm x 10 cm	10 uds/Caja	1266151
90120	Tegaderm Alginato en mecha	30.4 cm	5 uds/Caja	1266150



HIDROGEL AMORFO

3M™ TEGADERM™ HIDROGEL

Descripción del Producto: Gel amorfo estéril, sin conservantes, formulado como desbridante autolítico e hidratante. La consistencia del gel permite entregar humedad por más tiempo, trabajar en cavidades y zonas difíciles sin que se desplace o escurra. Libre de látex. Hipoalergénico. Aplique sin que sobresalga el tamaño de la herida.

Cubrir con apósitos secundarios que mantenga el control de la humedad.

Indicaciones: En heridas o úlceras con colonización baja y exudado escaso.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas.



91110 Tegaderm Hidrogel 15 gr 10 uds/Caja 1266887	Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
	91110	Tegaderm Hidrogel	15 gr	10 uds/Caja	1266887



SISTEMA COMPRESIVO MULTICAPA, DOS CAPAS

3MTM COBANTM 2

Descripción del Producto: Sistema compresivo de 2 capas de estiramiento corto, eficiente y cómodo, compresión sostenida hasta por 7 días. Primera capa de poliuretano (no estirar) y cohesivo, que se une a la segunda capa autoadherente (estirar) y en conjunto, otorgan compresiones de 40 mmHg. favoreciendo retorno

venoso y el rápido cierre de las úlceras venosas. Libre de látex e hipoalergénica.

Indicaciones: Indicado para tratamiento de úlcera venosa y linfedema. Con ITB mayor o igual a 0,8.

Frecuencia de Cambio: Según característica de la úlcera y apósito primario. Máximo por 7 días.



Código	Producto	Medidas	Empaque	ID CM
2094N	Sistema Compresivo Coban 2 Layer	Kit	1 Kit/Caja	1267453

GUÍA DE INSUMOS CLÍNICOS



Fabricamos, comercializamos y distribuimos insumos y equipamiento, principalmente para el área médica.

Dentro de nuestras líneas de productos se encuentran guantes quirúrgicos, de examinación y procedimiento, ropa médica desechable, kits médicos, apósitos, compresas, envoltorios y validadores para esterilización, equipos de uso médico, entre otros.

Estamos comprometidos a trabajar por una mejora conjunta y contínua, entregando a nuestros clientes apoyo técnico en todas nuestras líneas de productos.









Ventas e Información	MADEGOM CASA MATRIZ
Dirección	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9431 Quilicura, Santiago
Teléfono	+56 2 2435 7710
Sitio Web	www.madegom.cl
Linea Cuidado de la	Heridas
Gerente	Carlos de la Roza
Email	cdelaroza@madegom.cl
Teléfono	+56 2 2435 7764 / +56 9 6303 8674
Empresa representada	Lohmann & Rauscher
Ventas Web	www.comercialhevea.cl
Distribuidores	
Vitalsec	www.vitalsec.cl +56 2 2417 8808 / +56 2 2417 8796 ventas@vitalsec.cl
Stomabags	www.stomabags.cl +56 2 3210 4311 contacto@stomabags.cl
Buhos	www.buhoschile.cl +56 2 2611 3000 / +56 2 2235 8885 contacto@buhoschile.cl









TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

SUPRASORB® CNP

Descripción del Producto: Es fácil de aplicar y las pantallas tienen un diseño intuitivo. Solo es necesario reemplazar la bolsa de exudado y eliminar la usada, lo que reduce el espacio de almacenamiento y disminuye también los costos que esto implica. Está compuesto por:

- Easydress, sella las heridas en las extremidades de forma fácil y fiable.
- Película de drenaje (heridas abdominal), protege órganos y estructuras delicadas.
- Apósito de espuma y de gasa antimicrobiana.
- Incluyen kit de curación.

Indicación: Heridas altamente exudativas, abdomen abierto.

Frecuencia de cambio: Cada 48 horas o según protocolo institucional.



Ref. Madegom		Descripción	Medidas	Empaque
CH32900 CH32901		Bolsa Recolectora de Exudado	250 ml 1000ml	Ud
CH34040 CH34041 CH34042	9	Kit Plus con Gasa Antimicrobiana	S M L	Ud
CH34030 CH34031 CH34032	Suprasorb CNP	Kit Plus con Espuma	S M L	Ud
CH34901		EasyDress	S, M, L	Ud
CH39400 CH39395		Film de Drenaje (heridas, abdominal)	77x60 cm 25x20 cm	Ud



LIMPIADOR DE HERIDAS

DEBRISOFT® PAD

Descripción del Producto: Almohadilla de fibras de poliéster con puntas anguladas, para desbridamiento de heridas agudas y crónicas superficiales; rápido, altamente efectivo, seguro y virtualmente indoloro. Permite una remoción confiable de los detritos y el exudado de la herida, al igual que descamaciones y queratosis de la piel circundantes. Se preserva el tejido de granulación recientemente formado y las ya establecidas células epiteliales.

Indicación: En heridas o úlceras con infección o colonización.

Frecuencia de Uso: En cada curación con infección y colonización. Previo a su uso, la almohadilla se debe humedecer con solución fisiológica tibia, aplicar con movimientos circulares.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1379665	CH31222	APÓSITO DEBRISOFT DEBRIDANTE	10X10 cm	5 uds
	CH34323	APÓSITO DEBRISOFT DEBRIDANTE	13x20 cm	5 uds



HIDRATANTE, TUL DE PETROLATO

LOMATUELL® PRO

Descripción del Producto:

Tul de poliéster impregnado en vaselina e hidrocoloide. Se puede usar por ambos lados, se puede cortar.

Indicación: En epitelización o como apósito secundario

Frecuencia de cambio: Cada 3 a 4 días



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1427640	CH30871	APÓSITO LOMATUELL PRO TUL POLIESTER FLEXIBLE CON HIDROCOLOIDE	10X10 cm	10 uds





SISTEMA COMPRESIVO MULTICAPA, DOS CAPAS

ROSIDAL® TCS

Descripción del Producto: Sistema que combina los vendajes elásticos con los inelásticos. Ejerce una presión de 40 mmHg en el tobillo. Es desechable, puede utilizarse por 7 días. Está compuesta por dos vendas, la primera es una venda de confort porosa fabricada en espuma de poliuretano, algodón y poliamida de color blanco que va en contacto con la piel del paciente. La segunda es una venda compresión cohesiva de estiramiento corto sin látex. Una vez aplicadas, las dos vendas, se unirán firmemente debido a la propiedad de cohesividad que poseen.

Indicación: Úlceras venosas Tipos 3 y 4 principalmente, edema de toda la pierna.

Frecuencia de Cambio: Sistema diseñado para un sólo uso, mantiene la presión terapéutica durante 7 días, cambio según la necesidad del cambio de apósito.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363485	CH26484	VENDA ROSIDAL TCS SISTEMA COMPRESIVO 2 CAPAS DE TRACCIÓN CORTA	10cm x 6mt	Ud





BACTERICIDA, ALGINATO DE CALCIO CON PLATA IÓNICA

SUPRASORB® A + AG

Descripción del Producto: Suprasorb A + Ag tiene una alta capacidad de absorber exudado moderado a abundante, reduce la carga microbiana directamente en el lecho de la herida y por lo tanto especialmente adecuado para heridas que estén infectadas o en riesgo de infección. No aplicar en piel.

Indicación: Heridas o úlceras con exudados moderados a abundantes que están infectadas o en riesgo de infección.

Frecuencia de Cambio: Cada 24 a 48 horas



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1379662	CH20570	SUPRASORB A+AG	5 x5 cm	10 uds
1379663	CH20571	COMPRESA ALGINATO CALCIO	10x10 cm	10 uds





REGENERADOR, APÓSITO DE COLÁGENO

SUPRASORB® C

Descripción del Producto: Está compuesto de colágeno bovino, tiene una estructura porosa con actividad capilar altamente pronunciada que permite la absorción de exudados moderados. Promueve y acelera la formación de tejido de granulación. No se debe usar en heridas o úlceras infectadas o con exudados abundantes o con necrosis seca.

Indicación: Úlceras con colonización baja.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1427638	CH20481	APÓSITO SUPRASORB C APÓSITO DE COLÁGENO P/ HERIDAS	4 x 6 x 0.8 cm	5 uds



HIDRATANTE, APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO

SUPRASORB® F

Descripción del Producto: Película de poliuretano transparente con adhesivo hipoalergénico, manteniendo un ambiente húmedo fisiológico en la herida o úlceras, promoviendo la cicatrización. Se adapta rápidamente a cualquier contorno del cuerpo, ofreciendo alto grado de confort al usarlo. Es fácil de monitorear la herida y protege el tejido epitelial recién formado de factores externos como

microbios y humedad. Puede ser utilizado como apósito secundario

Indicación: Para el tratamiento de heridas o úlceras superficiales, no infectadas con colonización baja y exudado escaso.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1427642	CH20461	A DÁCITO CUIDDACODO E	5x7 cm	100 uds
1560938	CH20463	APÓSITO SUPRASORB F TRANSPARENTE ADHESIVO ESTÉRII	10x12 cm	50 uds
1427641	CH20464	LUTERIL	10x25 cm	10 uds



HIDRATANTE, HIDROGEL EN LÁMINA

SUPRASORB® G

Descripción del Producto: Apósito a base de agua y absorbente en una lámina con una cara externa con un poliuretano. Aporta humedad para un desbridamiento autolítico efectivo, remueve y retiene suavemente el tejido descamado, tejido necrótico y restos tisulares encontrados en el nivel del lecho de la herida. Alivia el dolor para el paciente. Es de fácil aplicación y manejo para el usua-

rio. Puede aplicarse más allá del borde de la herida, siempre que la piel no esté macerada.

Indicación: En todo tipo de herida o úlcera con colonización baja y exudado bajo.

Frecuencia de Cambio: Cada 72 horas



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1566105	CH33631	APÓSITO SUPRASORB G LÁMINA DE GEL ESTÉRIL	10x10 cm	5 uds



ABSORBENTE, ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA

SUPRASORB®P SENSITIVE

Descripción del Producto: Apósito a base de poliuretano con una cubierta de silicona. La construcción de tres o cuatro capas facilita la gestión dinámica de fluidos para proporcionar un ambiente húmedo óptimo para la herida. La suave capa de silicona se puede levantar y reposicionar sin perder su adherencia. Aplicar sobrepasando 2cm el horde de la Jesión

Indicación: Colonización baja con exudado moderado a abundante. Como prevención en la cizalla o en las LPP Tipo 1.

Frecuencia de Cambio: Cambio cada 3 o 4 días en heridas o úlceras, cada 7 días cuando se aplica en prevención.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1379653	CH20407	SUPRASORB P ESPUMA ABSORBENTE ESTÉRIL	10x10 cm	10 uds
1648450	CH32441	SUPRASORB P ESPUMA SILICONADA ABSORBENTE	7.5x7.5 cm	10 uds
1648452	CH32442	ESTÉRIL ESTE	10x10 cm	10 uds
1648449	CH20415	APÓSITO SUPRASORB P ESPUMA HIDROFÍILICA SACRAL ESTERIL	18x20.5 cm	5 uds



BACTERIOSTÁTICO, APÓSITO DE PHMB

SUPRASORB® X + PHMB

Descripción del Producto: Biocelulosa con 0,3% de PHMB actúa contra un amplio espectro de gérmenes, tales como SARM y ERV y algunos hongos. Si la herida está con exudado escaso, hidratar con hidrogel.

Indicación: Todo tipo de heridas y úlceras con colonización crítica con exudado escaso moderado.

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363174	CH20541	APÓSITO SUPRASORB X + PHMB ANTIMICROBIANO HIDROBALANCE	9x9 cm	5 uds
1648444	CH20540		5x5 cm	5 uds



SISTEMA COMPRESIVO, BOTA DE UNNA

VARICEX® S

Descripción del Producto: Es un vendaje inelástico, desechable, que entrega 20 mm Hg de compresión a nivel del maléolo cuando el paciente está deambulando. Está compuesta por una venda de gasa de viscosa/poliamida impregnada con pasta de zinc blanca, con elasticidad tanto a lo largo como a lo ancho. Se aplica húmeda en la extremidad afectada, transformándose en una compresión se-

mirígida cuando se seca. Áplicar con el pie en 90 grados. Se puede cortar el largo si sobra. Aplicar con sobreposición 50-50.

Indicación: Úlceras venosas Tipo 2,3 y 4 Mixtas, con edema de toda la pierna o cuando hay infección en la úlcera venosa.

Frecuencia de Cambio: Cada 7 días, pero el apósito primario utilizado le dará la frecuencia de cambio.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363483	CH20632	VENDA VARICEX ÓXIDO DE ZINC BOTA DE UNNA	10 cm x 10 mt	10 uds



BACTERICIDA, CARBÓN ACTIVADO CON PLATA METÁLICA

VLIWAKTIV® AG

Descripción del Producto: Compuesto por plata metálica (bactericida) y carbón activado el que permite absorber el exudado y neutralizar el olor. No cortar porque partículas de carbón activado podrían penetrar en la herida y teñir la piel. Si el exudado es escaso, hidratar la lesión con hidrogel. Se puede aplicar por cualquiera de las 2 caras

Indicaciones: Heridas o úlceras con exudado abundante con infección

Frecuencia de Cambio: Cada 24 o 48 horas según características de la zona infectada.



	p.f			
ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363178	CH20700	VLIWAKTIV AG CARBÓN ACTIVADO + PLATA	6.5x10 cm	10 uds
1363182	CH20701		10x10 cm	10 uds
1648446	CH20704		20x20 cm	10 uds



ABSORBENTE

VLIWASORB®

Descripción del Producto: Está compuesto internamente por un poliacrilato de sodio unido a una lámina de celulosa la que va en contacto con la lesión, esta composición presenta la ventaja de evitar el resecamiento del lecho de la herida, presenta una capa externa libre de látex. Los polímeros superabsorbentes absorben muchas veces su propio peso en líquidos. Funciona muy bien bajo vendajes de terapia compresiva.

Indicación: En heridas o úlceras con colonización baja con exudado moderado a abundante

Frecuencia de Cambio: Cada 3 a 4 días o según cantidad de exudado de la herida.



ID CM	Ref. Madegom	Descripción	Medidas	Empaque
1363186	CH24501	VLIWASORB APÓSITO DE ALTA ABSORCIÓN	10x10 cm	10 uds
1363188	CH24502		10x20 cm	10 uds
1427639	CH24503		20x20 cm	10 uds



Misión Curar las Heridas Capacitando para una Mejor Vida

. FINH.

Actividades FINH

- Atención de pacientes por un equipo especialista en heridas y úlceras
- Capacitación e Investigación clínica
- Ediciones de Guías Clínicas y Revistas
- Asesoría al Ministerio de Salud y FONDEF
- Respalda a la Sociedad de Enfermeras Latinoamérica en Heridas (SELH)
- Realiza Campañas Sociales



EM. Marcela Vergara



Dr. Cristián Salas



E.U. Isabel Aburto DIRECTORA

DIRECTORIO FINH



Dr. Isamel Pizarro



Ing. Gonzalo Espinoza



Dr. Rodrigo Julio

AGRADECIMIENTOS

A todas las empresas que colaboraron en esta segunda edición de esta Guía de Insumos Clínicos en Heridas y Úlceras, la que continuará siendo de gran ayuda a los clínicos y a los encargados de compra de insumos en manejo de heridas.































